

## Аспаргатаминотрансфераза, АСТ (монореагент)

**A15 - [Программирование Тестов]**  
 Настройка | Программа | Рабочая сессия | Текущее состояние | Архив | Утилиты | Выход | Помощь

Тесты: **Общие** | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

Тест идентификации:

Название:  Тип Пробы:  SER

Режим анализа:  Единицы:

Турбидиметрический тест

Тип реакции:

Возрастающая  Убывающая

Кол-во повторов:

Десятичные знаки:

Test Name in the Report:

**A15 - [Программирование Тестов]**  
 Настройка | Программа | Рабочая сессия | Текущее состояние | Архив | Утилиты | Выход | Помощь

Тесты: **Общие** | Процедура | Калибровка | Контроли | Опции

SER

Считывание:

Монохроматика  Бихроматика

Фильтры:

Основной:  Референснь:

Объемы:

Проба:  uL  
 Реактив 1:  uL  
 Реактив 2:  uL  
 Промывание:  mL

Время:

[s] Циклы

Начальное Чтение:    
 Финальное Чтение:    
 Реактив 2:

Фак-р Предразв.


Предразв. Анализатором  Предразв. Пользователем

Фак-р Постразв.:

Уменьшенный 1/   
 Увеличенный x

Автоматический повтор

# Параметры теста для ввода в программу анализатора BioSystems A-15

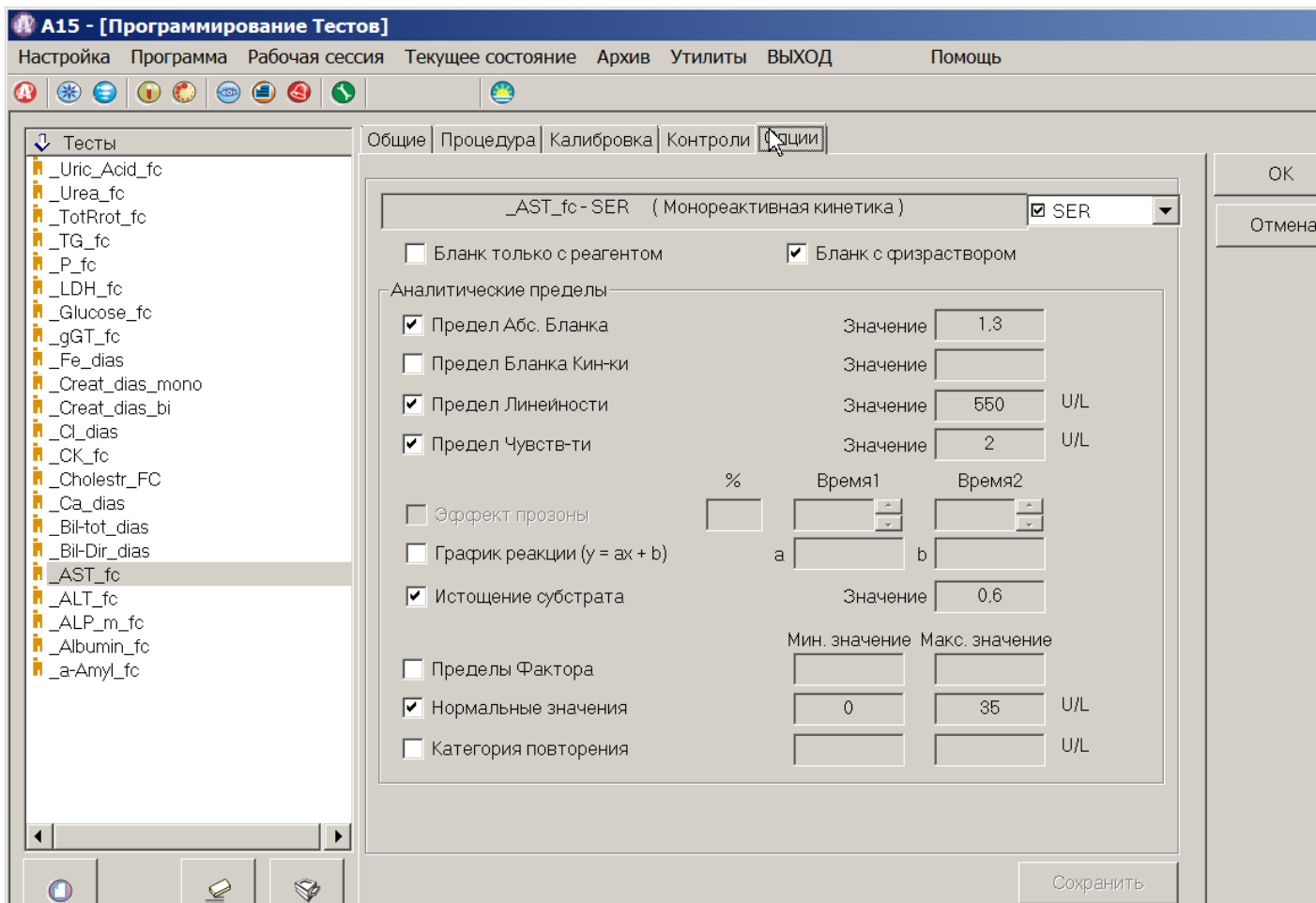

Тест разработан для определения активности АСТ от 2 до 550 Ед./л.