


Параметры теста для ввода в программу анализатора BioSystems A-25


Прежде чем приступать к программированию теста, необходимо зарегистрировать реагенты для него:

Делаем это из окна программирование – самый нижний пункт меню. 1- реагент для монореагентной методики, 2- реагента для биреагентной методики.

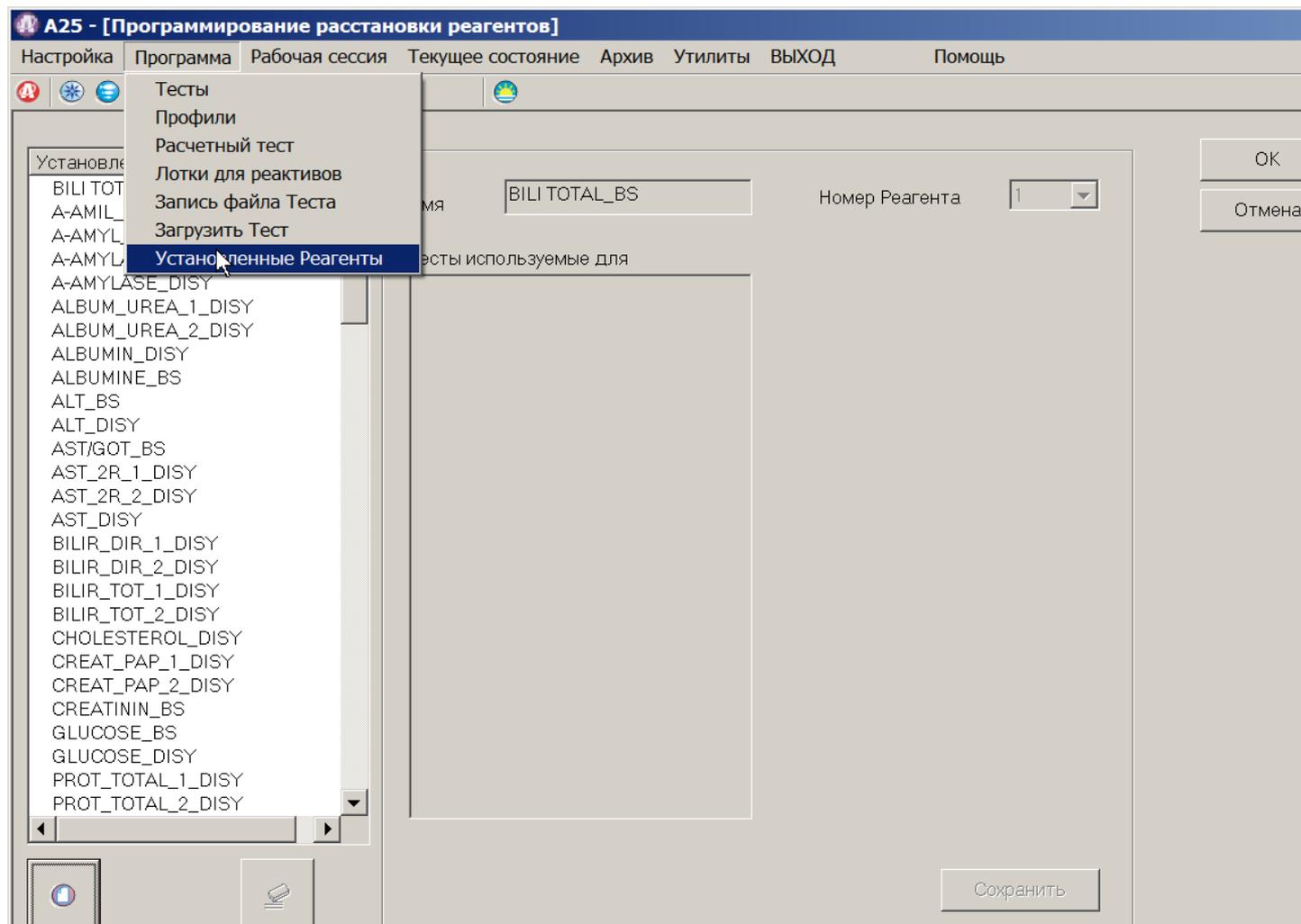


Параметры теста для ввода в программу анализатора BioSystems A-25

Для всех методов с линейной калибровкой, где используется один калибратор (второй - вода или физраствор), разница может быть только в том, - используется мульти калибратор или специфический. Окно «калибровка» при использовании мульти калибратора выглядит так:

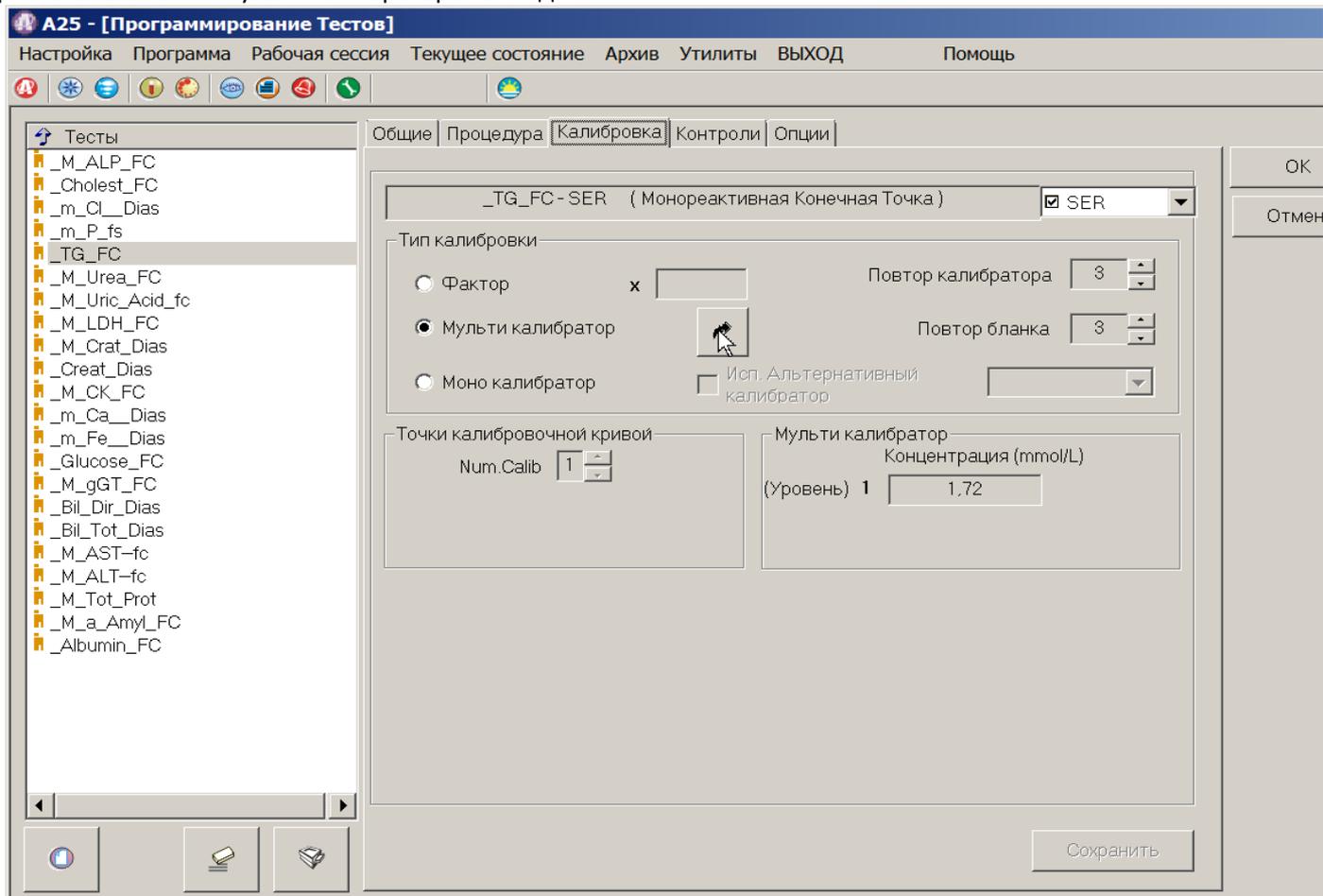


Для задания значений калибратора нажмите кнопку со стрелкой, и вы попадёте в окно, где можно задать новый мультикалибратор; привязать его к методике и задать его значения:

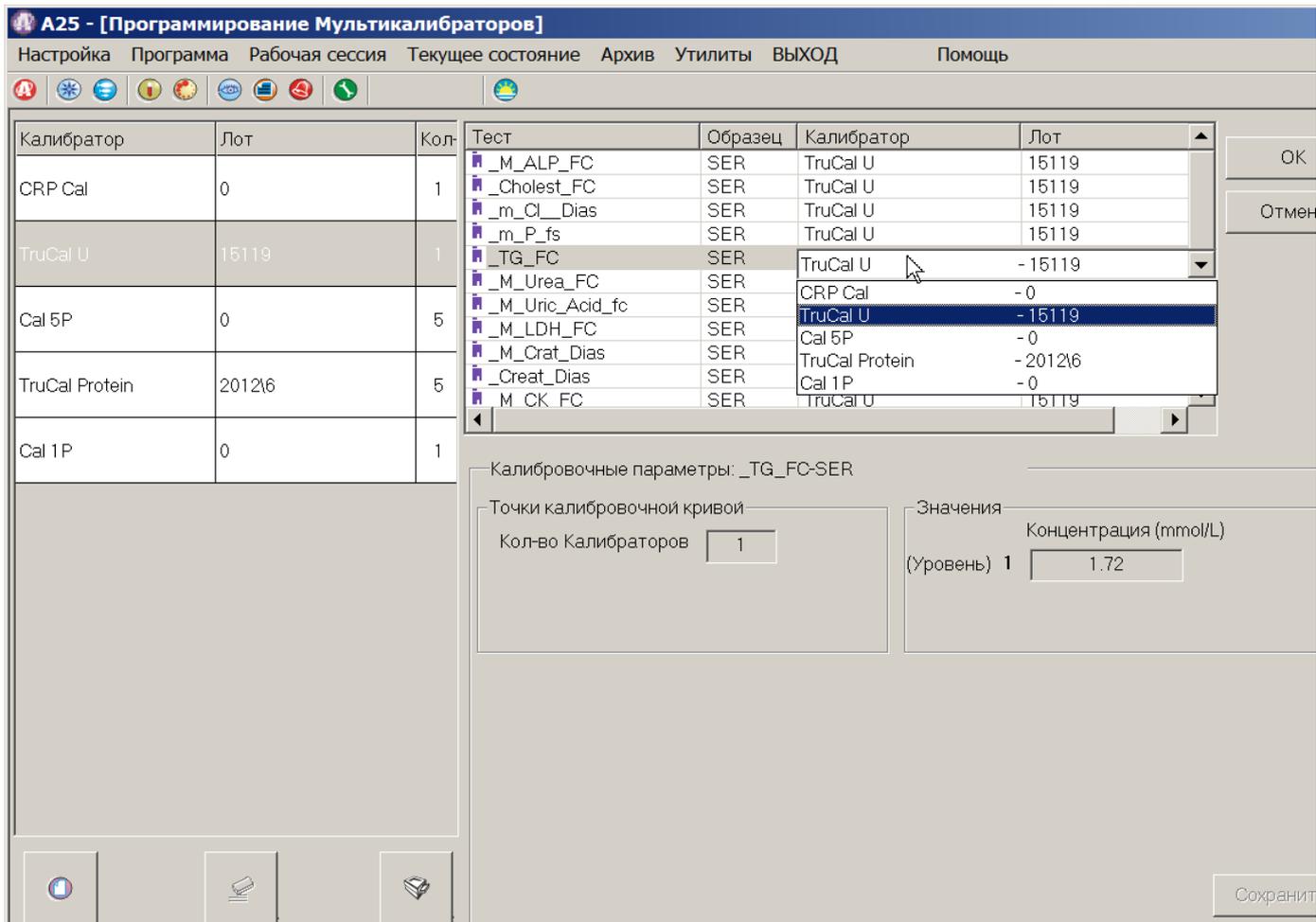

Параметры теста для ввода в программу анализатора BioSystems A-25

Задание контролей для методик с двумя уровнями контроля с использованием мультиконтроля:

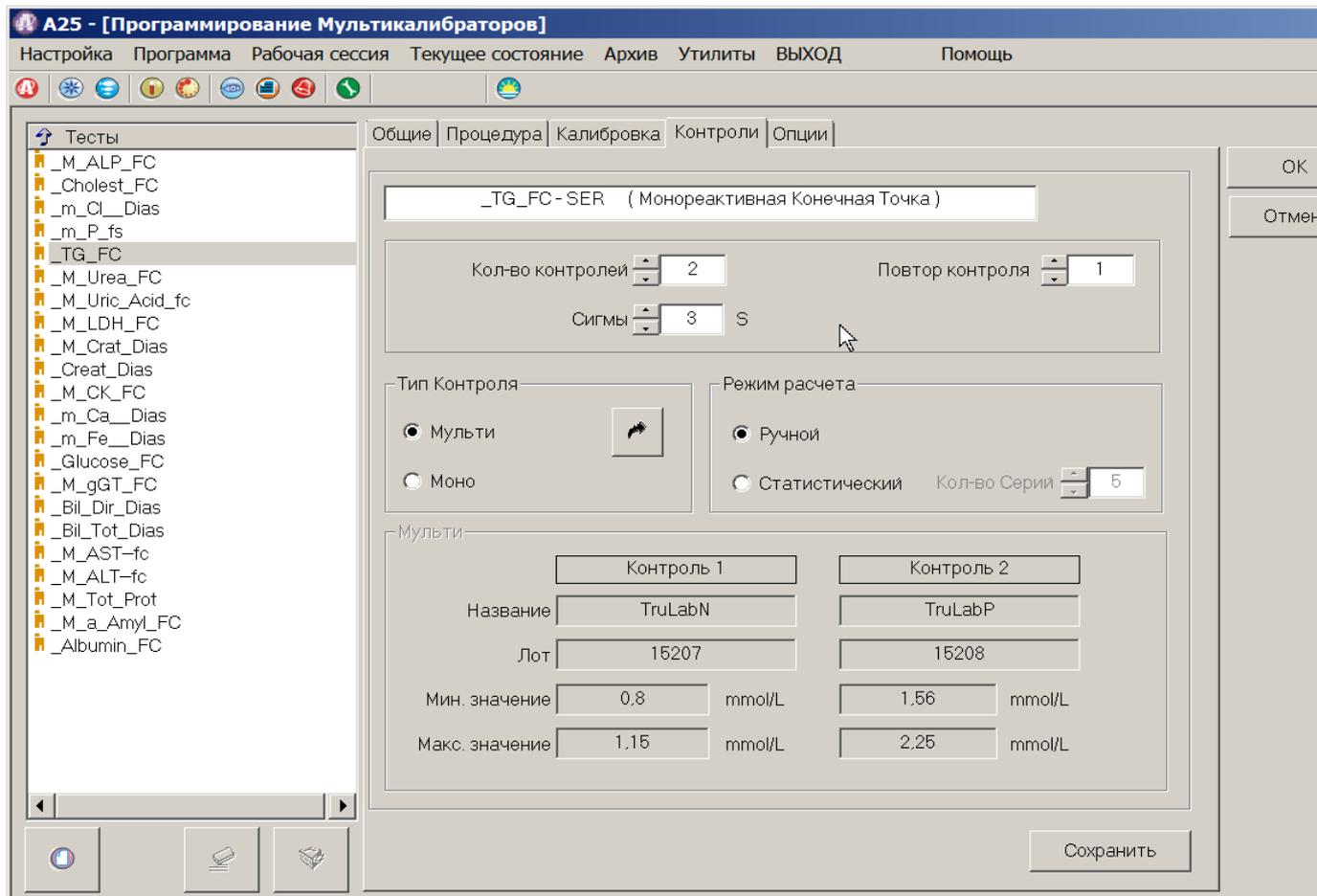

При нажатии кнопки со стрелкой, вы попадаете в окно, где можно задать новый контроль, выбрать контроль для методики и задать диапазон допустимых значений:

