

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
IgG		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	IgG	R1	400	R2	80	Объем проб	3	R1 холост	
№	*	Смеш.хол.реаг		Диап.линейн.	1.7 - 35	Предел линейн.		Предел субстр.	
Полн.назв	Иммуноглобулин-G	Кэфф.		<input type="checkbox"/> Проверка прозоны					
№ станд.		q1		q2		q3		q4	
Тип реакц	Кон.точ.	ПК		Пог					
Перв.крив	578								
Втор.крив									
Направл.	Увеличен								
Вр.реакц	-1 - 11								
Вр.инкуб.	16								
Единица	g/L								
Точн.	0.1								

Доб.      Удалить      ОК      Отмена

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.


При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
IgG		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок				
1	Муж	Сыворот		7	16				
2	Жен	Сыворот		7	16				
Пол		Проба	Возраст	Низкий	Высок				

Доб.      Удалить      ОК      Отмена

Доб.      Удалить      ОК      Отмена

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

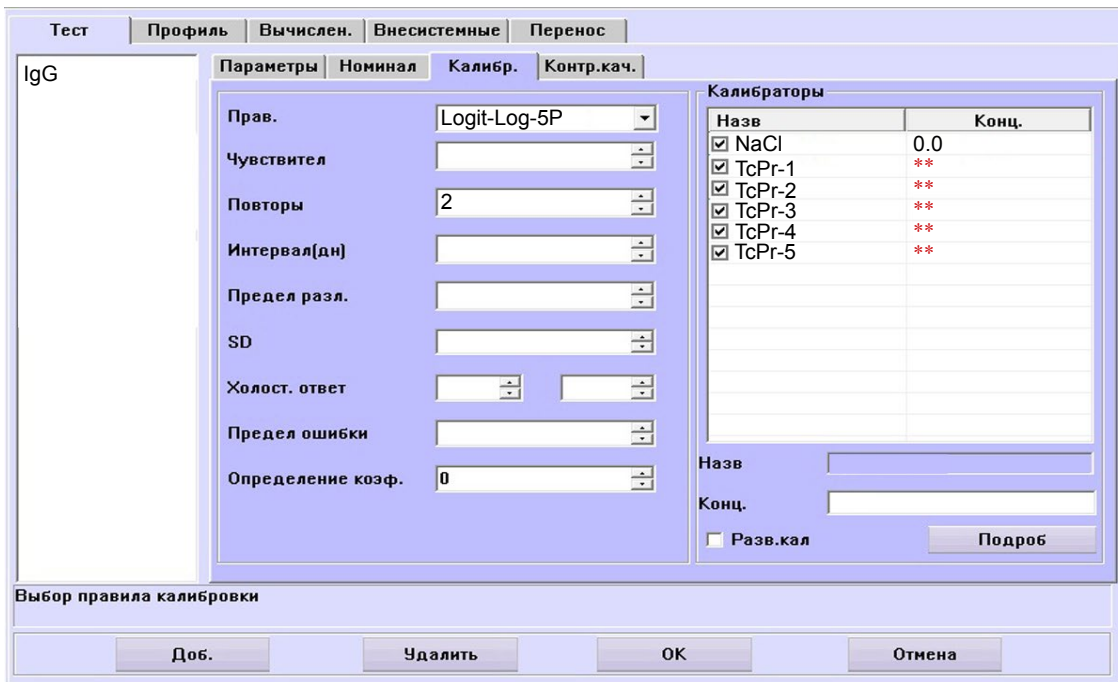

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

ИгG

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. [ ]

Повторы 2

Интервал(дн) [ ]

Предел разл. [ ]

SD [ ]

Холост. ответ [ ] [ ]

Предел ошибки [ ]

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5	**

Назв [ ]

Конц. [ ]

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Логит-лог5р, (сплайн), 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.

В связи с техническими особенностями анализатора соотношение образца и реагента в данной адаптации изменено относительно инструкции.