

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

Select (прямой селективный)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

ЛПНП (липопротеины низкой плотности)

Select (прямой селективный)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	Иртная концен	Годен	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalL		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal HDL/LDL).

Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.