

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-800

**Опред./правка химанализов**

Хим.	<input type="text" value="αHBDH"/>	№ *	<input type="text"/>	Тип пробы	<input type="text" value="Сыворотка"/>
Химанализ	<input type="text" value="DGKC"/>			Имя для печ	<input type="text" value="αГБДГ"/>

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	<input type="text" value="Кинетический"/>	Направление реакции	<input type="text" value="Отрицательный"/>							
Перв. д/в	<input type="text" value="340"/>	Втор. д/в	<input type="text" value="546"/>							
Ед.изм.	<input type="text" value="Ед/л"/>	Десятич	<input type="text" value="0"/>							
Время хол.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Время реакции	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="30"/>					
Об. Пробы	<input type="text" value="1,5"/>	Аспирировано	<input type="text" value=""/>	Разбавитель	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Холост.проб				
Стандарт	<input type="text" value="1,5"/>	uL	<input type="text" value=""/>	uL	<input type="text" value=""/>	uL				
Понижен.	<input type="text" value="1,5"/>	uL	<input type="text" value="35"/>	uL	Р1	<input type="text" value="150"/>	uL	Р2	<input type="text" value="38"/>	uL
Повышенный	<input type="text" value="3"/>	uL	<input type="text" value=""/>	uL	Р3	<input type="text" value=""/>	uL	Р4	<input type="text" value=""/>	uL

Диап.линейности	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="checkbox"/> Автоповтор				
Предел линейности	<input type="text" value="0,3"/>						
Поглощ.хол.Р1	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>	Источение субстрата	<input type="text"/>			
Отклик холост.	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>	Смеш.хол.погл.	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>		
Парн.химанализ	<input type="text"/>			Вр.после открытия	<input type="text"/>	Дней	
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input type="radio"/> Пров. скорости	<input type="radio"/> Внесение антигена					
Q1	<input type="text"/>	Q2	<input type="text"/>	Q3	<input type="text"/>	Q4	<input type="text"/>
PC	<input type="text"/>	ABS	<input type="text"/>				

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 0-182

Женщины: 0-182

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Двухточечная линейная, (калибратор TruCalU) или по фактору.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.