


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

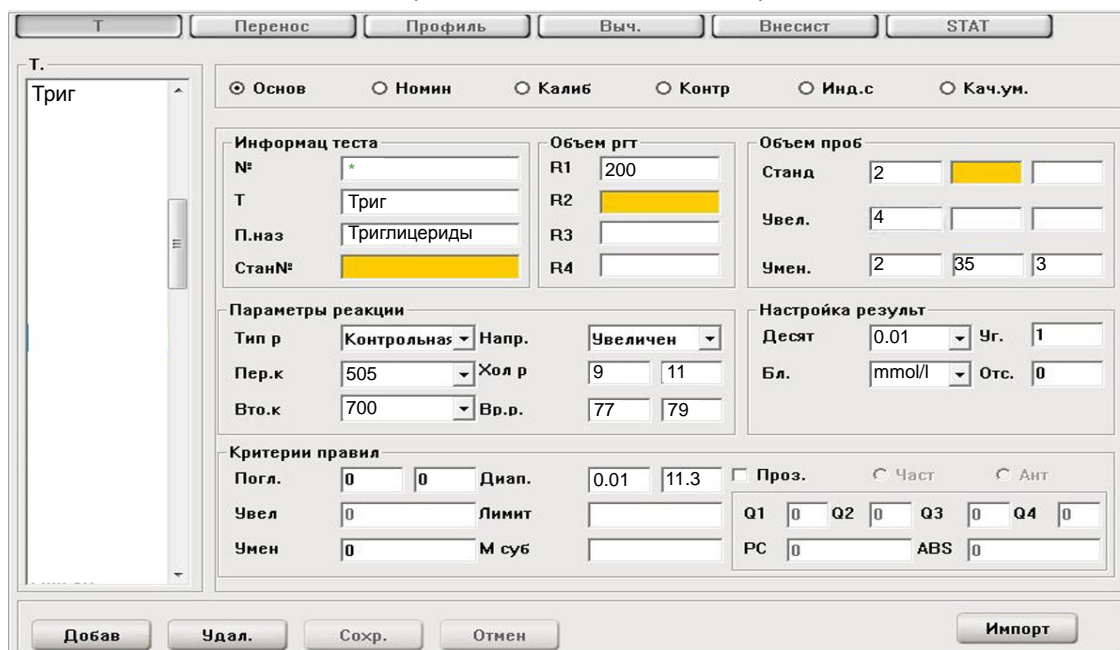

Т.

Основ
  Номин
  Калиб
  Контр
  Инд.с
  Кач.ум.

**Информац теста**  
 №: \*   
 Т: Триг  
 П.наз: Триглицериды  
 Стан№:

**Объем ргг**  
 R1: 200  
 R2:   
 R3:   
 R4:

**Объем проб**  
 Станд: 2   
 Увел.: 4   
 Умен.: 2  35  3

**Параметры реакции**  
 Тип р: Контрольназ  Напр.: Увеличен   
 Пер.к: 505  Хол р: 9  11   
 Вто.к: 700  Вр.р.: 77  79

**Настройка результат**  
 Десят: 0.01  Уг.: 1   
 Бл.: mmol/l  Отс.: 0

**Критерии правил**  
 Погл.: 0  0  Диап.: 0.01  11.3   
 Увел.: 0  Лимит:   
 Умен.: 0  М суб:


През.
  Част
  Ант

Q1: 0  Q2: 0  Q3: 0  Q4: 0   
 PC: 0  ABS: 0

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

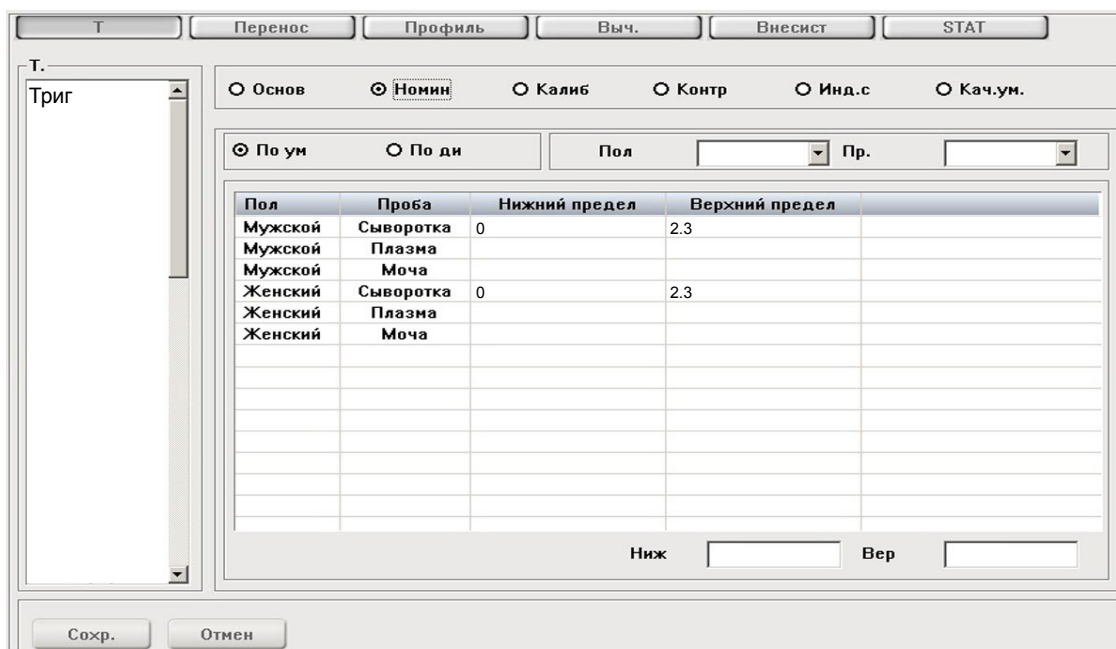

Т.


Основ
  Номин
  Калиб
  Контр
  Инд.с
  Кач.ум.

По ум
  По дн
 Пол:  Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	2.3
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	2.3
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж:  Вер:

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

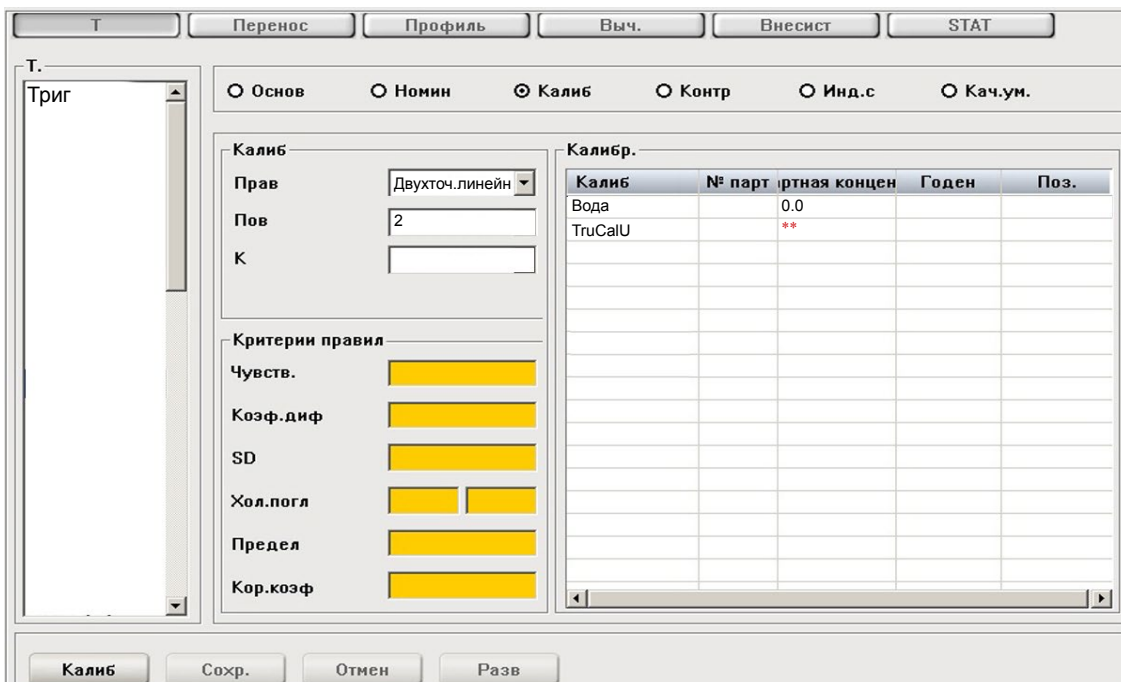

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или стандарту из набора.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.