

Фосфолипиды

PAR, enzymatic (ферментативный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест	Флип	R1	360
№	*	R2	90
Полн.назв	Фосфолипиды	Объем проб	3
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	578	Диап.линейн.	0.09 - 13.3
Втор.крив		Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 17	Кэфф.	
Вр.инкуб.	16	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Единица	mmol/L	q1	q2
Точн.	0.01	q3	q4
		ПК	Пог

Buttons: Доб., Удалить, ОК, Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		1.61	3.55
2	Жен	Сыворот		1.61	3.55

Buttons: Доб., Удалить, ОК, Отмена

Фосфолипиды

PAF, enzymatic (ферментативный метод)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Флип

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCallL	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Линейная (по стандарту Phospholipids Standatd).
Контроль по TruLab N и TruLab P или по TruLab L уровень 1 и уровень 2.