


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

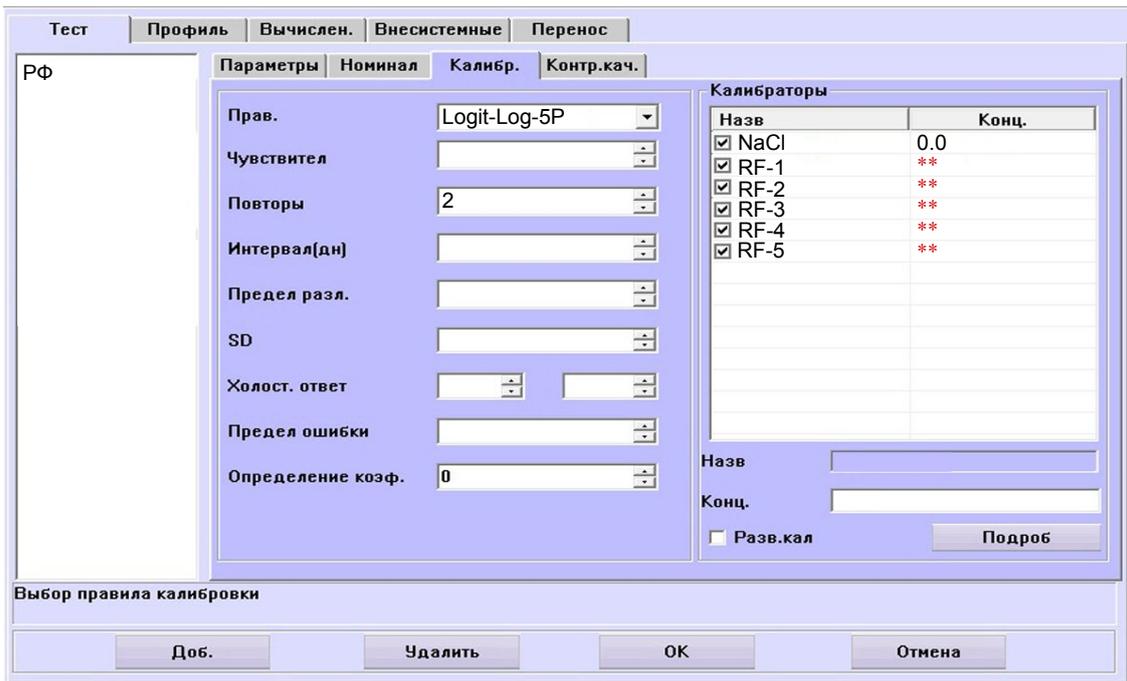

The screenshot shows a software window titled "РФ" (RFA) with several tabs: "Тест", "Профиль", "Вычислен.", "Внесистемные", and "Перенос". The "Калибр." (Calibration) tab is active, showing a list of calibration parameters and a table of calibration standards.

Parameters:

- Прав.: Logit-Log-5P
- Чувствител.: [dropdown]
- Повторы: 2
- Интервал(дн): [dropdown]
- Предел разл.: [dropdown]
- SD: [dropdown]
- Холост. ответ: [dropdown] [dropdown]
- Предел ошибки: [dropdown]
- Определение коэф.: 0

Калибраторы (Calibration Standards):

Назв.	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> RF-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> RF-5	**

Buttons: Доб., Удалить, ОК, Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal RF, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.