


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

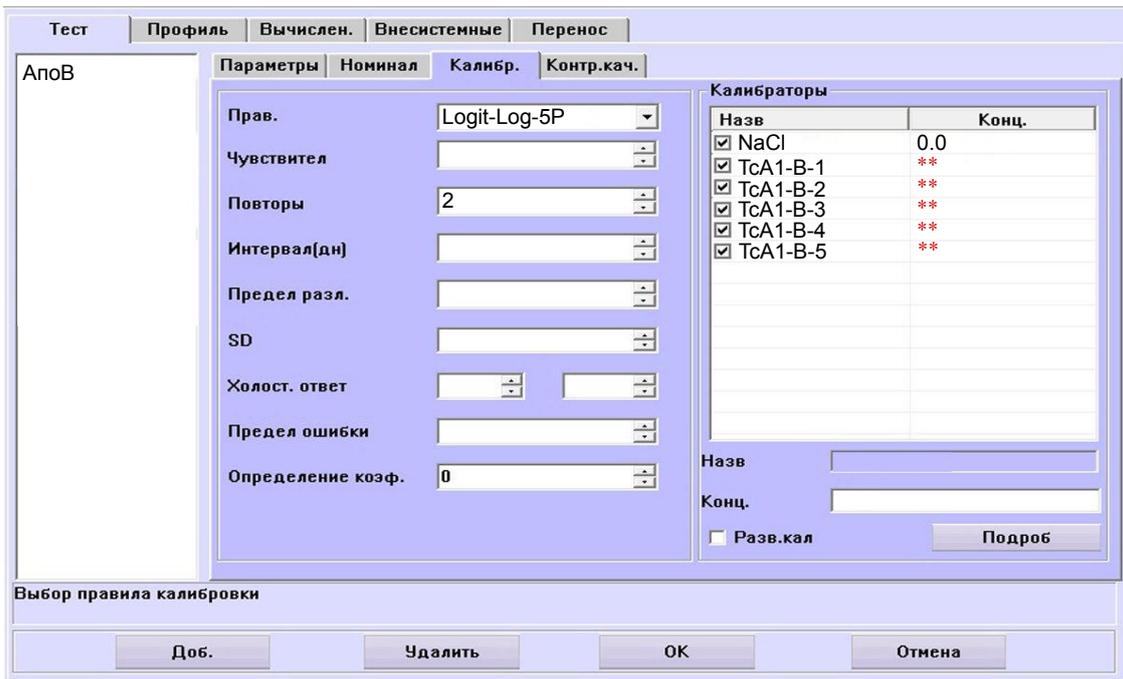

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

АпоВ

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител.

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCal Apo A1-B-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruCal Apo A1-B-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruCal Apo A1-B-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruCal Apo A1-B-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TruCal Apo A1-B-5	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | OK | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек.

Набор стандартов TruCal Apo A1-B (5 уровней)+ вода (или физраствор).

Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и TruLab P.