



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

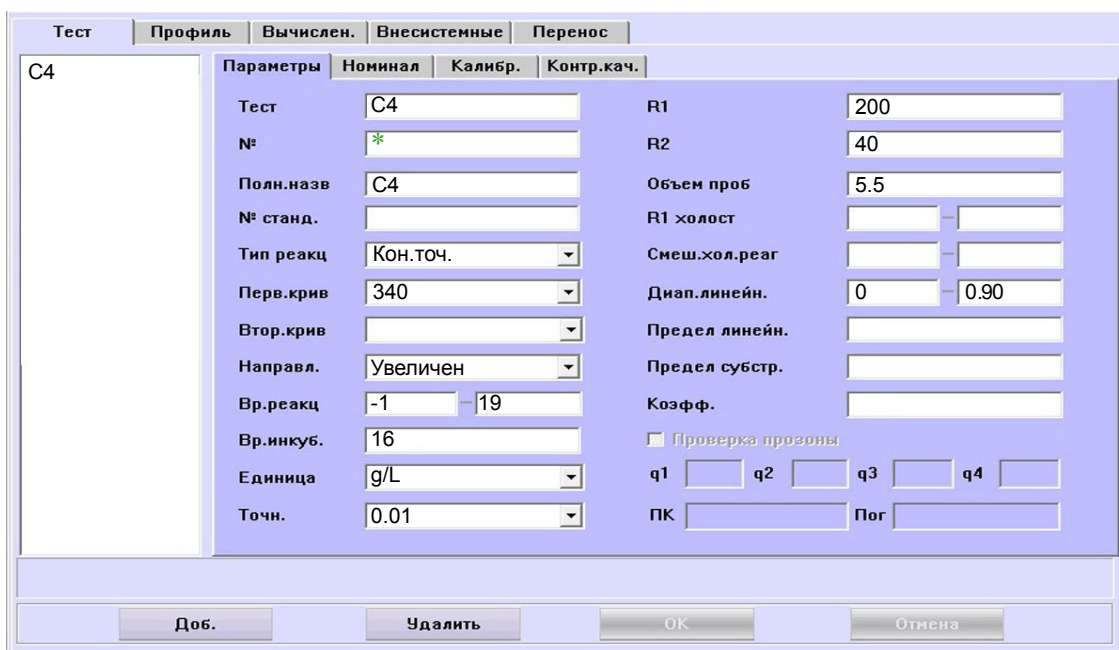

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

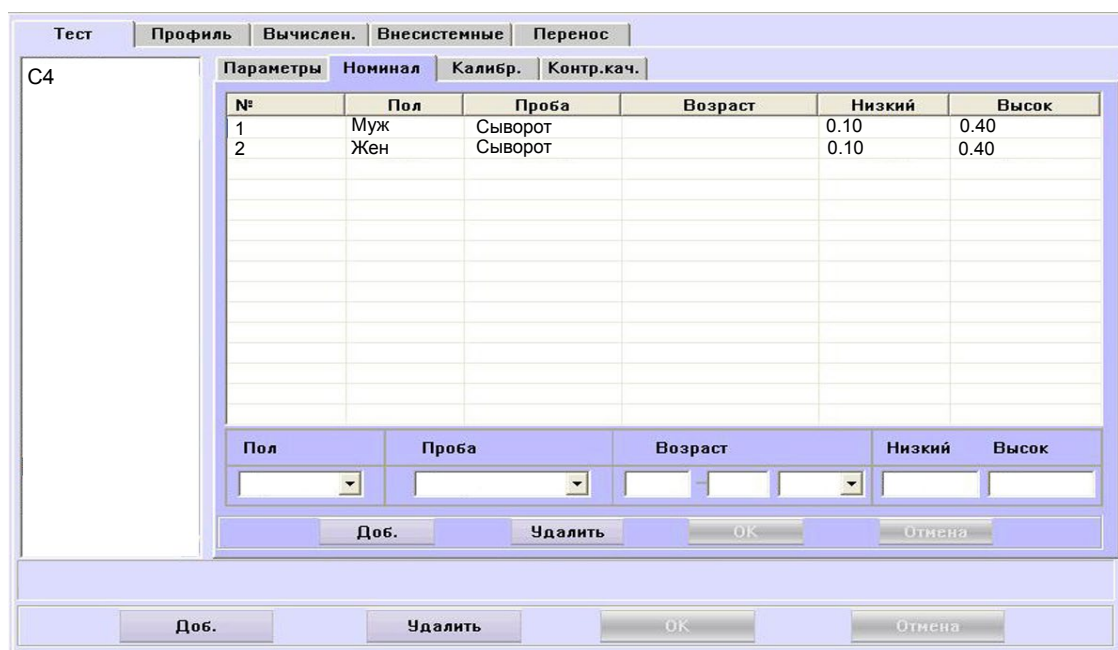

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высокий
1	Муж	Сыворот		0.10	0.40
2	Жен	Сыворот		0.10	0.40

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры	Номинал	Калибр.	Контр.кач.
Прав.		Logit-Log-5P	
Чувствитель			
Повторы	2		
Интервал(дн)			
Предел разл.			
SD			
Холост. ответ			
Предел ошибки			
Определение коэф.	0		

Калибраторы	Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/>	NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/>	TcPr-5	**

** - вводится из паспорта к калибратор 0

Тип калибровки: Лог-лог5p, (сплайн, сплайн2) 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.