

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест : HBDH	Автоповтор : <input type="checkbox"/>	Он-лайн калиброе : <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта : аГБДГ	Он-лайн калиброе : <input type="checkbox"/>	Cuvette Wash : <input type="checkbox"/>
Ед. : УЛ	Знаки п/запятой : 0	Всего реагентов : 2
Основная дл. волны : 340	Вспомогат. : 546	★ Реагент R1 : HBDH R1
Тип метода : Rate-A	Тип калибровки : Linear	★ Реагент R2 : HBDH R2
Нач. M1 : 0	Кон. M1 : 0	
★ Нач. M2 : 19	★ Кон. M2 : 27	
Дубли пробы : 1	Дубли стандарта : 2	
Дубли контроля : 1	Интервал контроля : 0	
Напр-ние реакции : Уменьшение	Предел погл. : 0.4	
Предел прозоны, % : 0	Проверка прозоны : Верхн.	
Предел лин-сти, % : 0	Приращ. погл./мин. : 0.0	
Технич. минимум : 3	Технич. максимум : 1200	
Y=aX+b    a= : 1    b= : 0		

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест : HBDH		
Тип пробы : SERUM		

Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 2	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 4	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 2	µl	Проп. развед.	: 10	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта	: 2	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
					<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
					<input type="checkbox"/> OTHER

Объемы реагентов и скор. мешалки			
★ Объем R1	: 200	µl	★ Скор. мешалки R1 : Сред.
★ Объем R2	: 50	µl	★ Скор. мешалки R2 : Выс.

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности | Объемы теста | Контрольные интервалы

Тест : **HBDH**  
 Тип пробы : **SERUM**  
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)  
 Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0	182	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ  
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности | Объемы теста | Контрольные интервалы

Тест : **HBDH**  
 Тип пробы : **SERUM**  
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)  
 Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0	182	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ  
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по фактору.  
 Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. **ВАЖНО!** В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !