

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: UIBC	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: НЖСС	Он-лайн калибровк	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: umol/l	Знаки п/запятой	: 1		
Основная дл. волны	: 600	Вспомогат.	: 700		
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: Linear		
Нач. M1	: 21	Кон. M1	: 23		
★ Нач. M2	: 60	★ Кон. M2	: 62		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 1	Технич. максимум	: 135		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			
<input type="button" value="Задайте он-лайн калибровку"/>					
<input type="button" value="DOWNLOAD TEST"/>					
<input type="button" value="UPLOAD TEST"/>					
<input type="button" value="УСТАН. АВТОПОВТОР"/>					
<input type="button" value="КОПИР. ТЕСТ"/>					
<input type="button" value="ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)"/>					

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: UIBC				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб					
★ Норм.	: 18.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 36.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 9.0	µl	Проп. развед.	: 1	X
★ Объем стандарта	: 18.0	µl			
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 180	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 45	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER					
<input type="button" value="КОПИР. ОБЪЕМЫ"/>					
<input type="button" value="ПРОСМ. ОБЪЕМОВ"/>					

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : **UIBC**

Тип пробы : **SERUM**

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 21	84
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : **UIBC**

Тип пробы : **SERUM**

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 21	84
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).  
Контроль по TruLab N.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !