



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

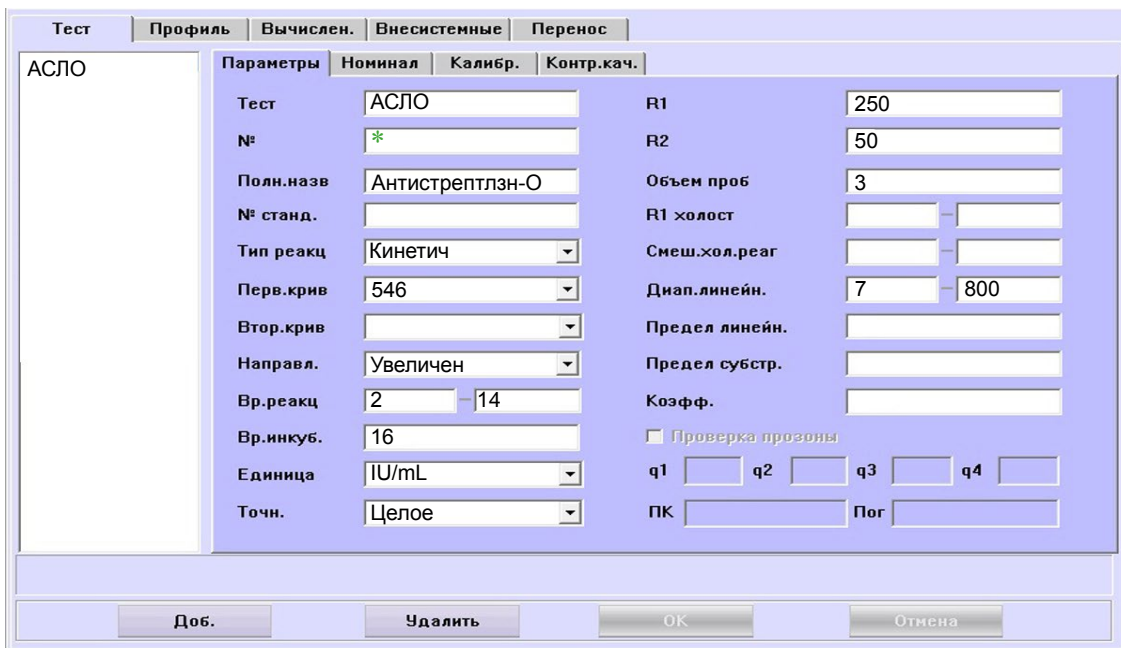

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

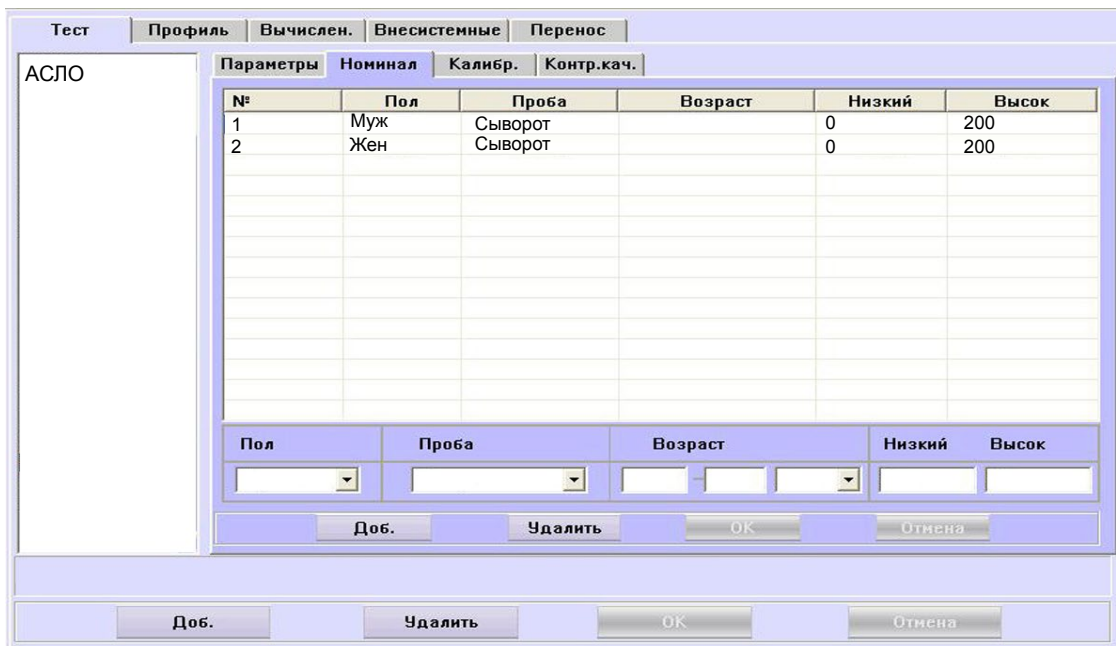

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот	0	0	200
2	Жен	Сыворот	0	0	200

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

# Антистрептолизин-О

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Тест    Профиль    Вычислен.    Внесистемные    Перенос

АСЛО

Параметры    Номинал    Калибр.    Контр.кач.

Прав.    Logit-Log-5P

Чувствител.    -

Повторы    2

Интервал(дн)    -

Предел разл.    -

SD    -

Холост. ответ    -    -

Предел ошибки    -

Определение коэф.    0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> ASLO-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> ASLO-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> ASLO-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> ASLO-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> ASLO-5	**

Назв    -

Конц.    -

Разв.кал   

Выбор правила калибровки

\*\* - вводится из паспорта к калибратору.

Тип калибровки: сплайн или логит-лог5р, 6 точек.

Набор стандартов TruCal ASLO, 5 уровней + вода (или физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.