

Триглицериды

GPO-PAP (глицерол-3-фосфатоксидасный метод)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест: Триг

№: *

Полн.назв: Триглицериды

№ станд.:

Тип реакц: Кон.точ

Перв.крив: 510

Втор.крив: 670

Направл.: Увеличен

Вр.реакц: -1 | 33

Вр.инкуб.:

Единица: mmol/L

Точн.: 0.01

R1: 280

R2: 0

Объем проб: 3

R1 холост:

Смеш.хол.реаг:

Диап.линейн.: 0.01 | 11.30

Предел линейн.:

Предел субстр.:

Коефф.:

Проверка прозоны

q1: | q2: | q3: | q4:

ПК: | Пор:

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.


При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0	2.3
2	Жен	Сыворот		0	2.3

Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

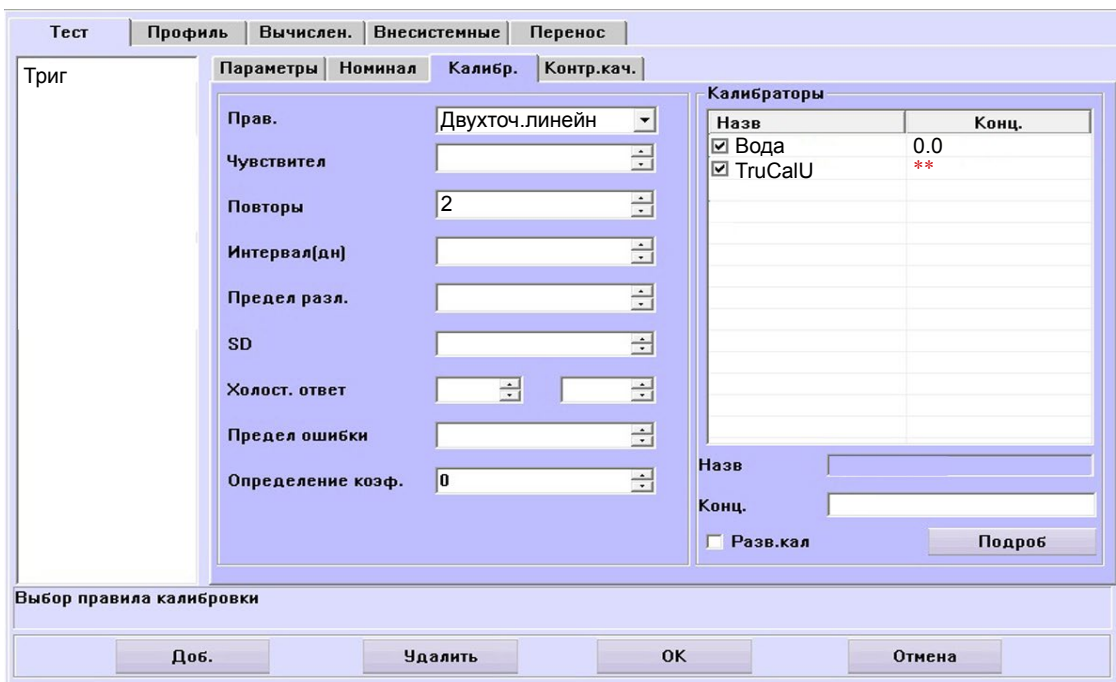

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Триг

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.