

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест		Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
Альбум					
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
Тест	Альбум		R1	300	
№	*		R2	0	
Полн.назв	Альбумин		Объем проб	3	
№ станд.			R1 холост		
Тип реакц	Кон.точ		Смеш.хол.реаг		
Перв.крив	546		Диап.линейн.	2 - 60	
Втор.крив	670		Предел линейн.		
Направл.	Увеличен		Предел субстр.		
Вр.реакц	-1 - 33		Коефф.		
Вр.инкуб.			<input type="checkbox"/> Проверка прозоны		
Единица	g/L		q1	q2	q3 q4
Точн.	0.1		ПК	Пог	
<input type="button" value="Доб."/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>					

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест		Профиль	Вычислен.	Внесистемные	Перенос
Альбум					
Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.					
№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		35	52
2	Жен	Сыворот		35	52
<input type="button" value="Доб."/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>					
<input type="button" value="Доб."/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>					

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-120

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Альбум

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов целесообразно вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.