

# C-Реактивный белок (Uhs-высокочувствительный)

ImmunoTD Uhs for hs (Иммунотурбидиметрический с латексом, высокочувствительный)



## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
* Тест	: CRPHS	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: ЦРБ	Он-лайн калиброе	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: mg/l	Знаки п/запятой	: 2	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>
Основная дл. волны	: 505	Вспомогат.	: -----	Всего реагентов	: 2
Тип метода	: RATE-A	Тип калибровки	: 5p-logit-log	* Реагент R1	: CRPhs R1
Нач. M1	: 0	Кон. M1	: 0	* Реагент R2	: CRPhs R2
* Нач. M2	: 28	* Кон. M2	: 55		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2	<div style="text-align: center;">Задайте он-лайн калибровку</div> <div style="text-align: center;">DOWNLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">UPLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">УСТАН. АВТОПОВТОР</div> <div style="text-align: center;">КОПИР. ТЕСТ</div> <div style="text-align: center;">ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)</div>	
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн.		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0	Технич. максимум	: 35		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: CRPHS				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб				Типы проб	
* Норм.	: 15	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 30	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 5	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> CSF
* Объем стандарта	: 15	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
					<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
					<input type="checkbox"/> OTHER
Объемы реагентов и скор. мешалки					
* Объем R1	: 150	µl	* Скор. мешалки R1	: Сред.	
* Объем R2	: 150	µl	* Скор. мешалки R2	: Выс.	
КОПИР. ОБЪЕМЫ					
ПРОСМ. ОБЪЕМОВ					

# C-Реактивный белок (Uhs-высококочувствительный)

ImmunoTD Uhs for hs (Иммунотурбидиметрический с латексом, высококочувствительный)



## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : CRPHS

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 0	5
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : CRPHS

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
★ Норм.	: 0	5
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal CRP- hs, 5 уровней + вода или физраствор).

Контроль по TruLab CRP- hs уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !