

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Миогл		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	Миогл	R1	150	R2	50	Объем проб	5	R1 холост	
№	*	Смеш.хол.реак		Диап.линейн.	5 - 600	Предел линейн.		Предел субстр.	
Полн.назв	Миоглобин	Козфф.		Комп.	Наклон 1	Отс.	0	Проверка прозоны	<input type="checkbox"/>
№ станд.		q1		q2		q3		q4	
Тип реакц	Кинетич	ПК		Пог					
Перв.крив	570								
Втор.крив									
Направл.	Увеличен								
Вр.реакц	2 - 16								
Вр.инкуб.	14								
Единица	ug/L								
Точн.	0.1								
Доб.		Удалить		OK		Отмена			


* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Миогл		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок				
1	Муж	Сыворот		0	70				
2	Жен	Сыворот		0	70				
Пол		Проба	Возраст	Низкий	Высок				
Доб.		Удалить		OK		Отмена			
Доб.		Удалить		OK		Отмена			

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

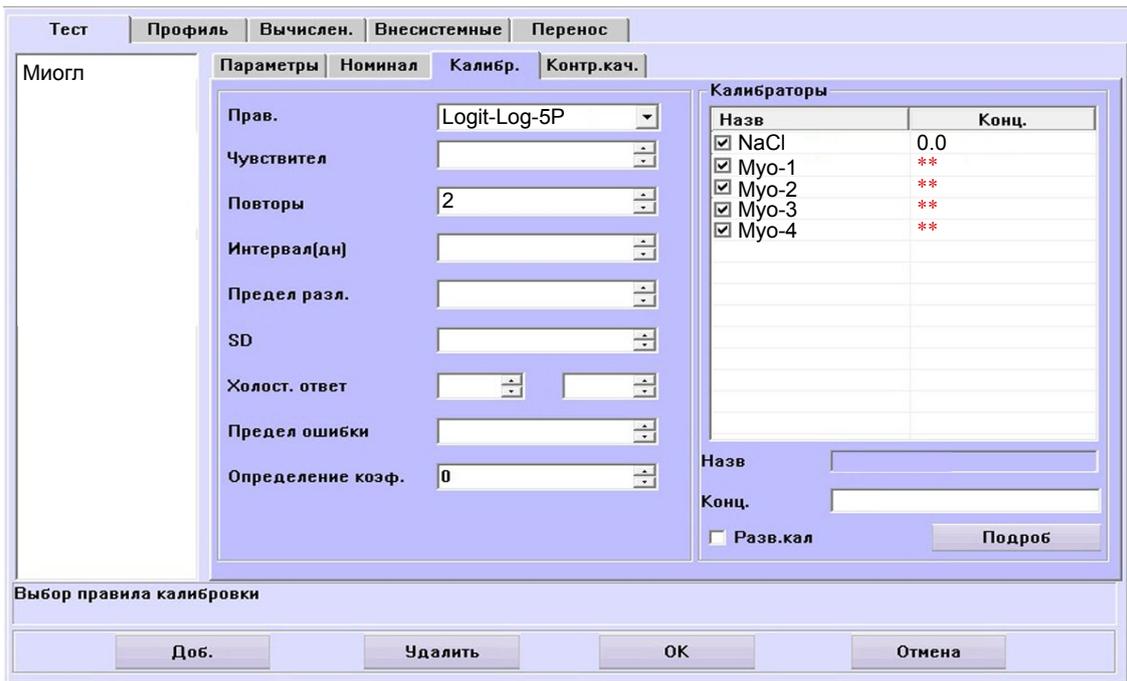

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> Myo-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> Myo-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> Myo-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> Myo-4	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 5 точек, набор стандартов TruCal Myoglobin, 4 уровня + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.