

β2-Microglobulin Standard Set **Калибратор бета2-микроглобулина (4 уровня)**

Назначение

Для построения калибровочных кривых при количественном иммунохимическом определении β2-микроглобулина (BMG).

Состав

Калибраторы BMG представляют собой человеческую сыворотку, к которой добавлен очищенный β2-микроглобулин, выделенный из человеческой мочи.

Консерванты: азид натрия, 0,095 % (по весу).

Упаковка

4 флакона × 1 мл Кат. №: BMG/STS-4X1

Готовы к использованию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при +2 – +8°C. Срок годности указан на ярлыке.

После вскрытия флакона сыворотка должна быть использована в течение 6 недель. После отбора порции сыворотки флакон плотно закрыть и хранить при +2 – +8°C.

Не замораживать!

	№ лота	Годеи до:	Установленные значения
Калибратор бета2-микроглобулина уровень 1	AL04824	2023-06	1,23 мг/л
Калибратор бета2-микроглобулина уровень 2		2023-06	2,86 мг/л
Калибратор бета2-микроглобулина уровень 3		2023-06	5,14 мг/л
Калибратор бета2-микроглобулина уровень 4		2023-06	10,66 мг/л

Изготовитель

“Aptec Diagnostics nv” Industriepark-West 42C,
Sint-Niklaas, 9100, Belgium (Бельгия)