


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

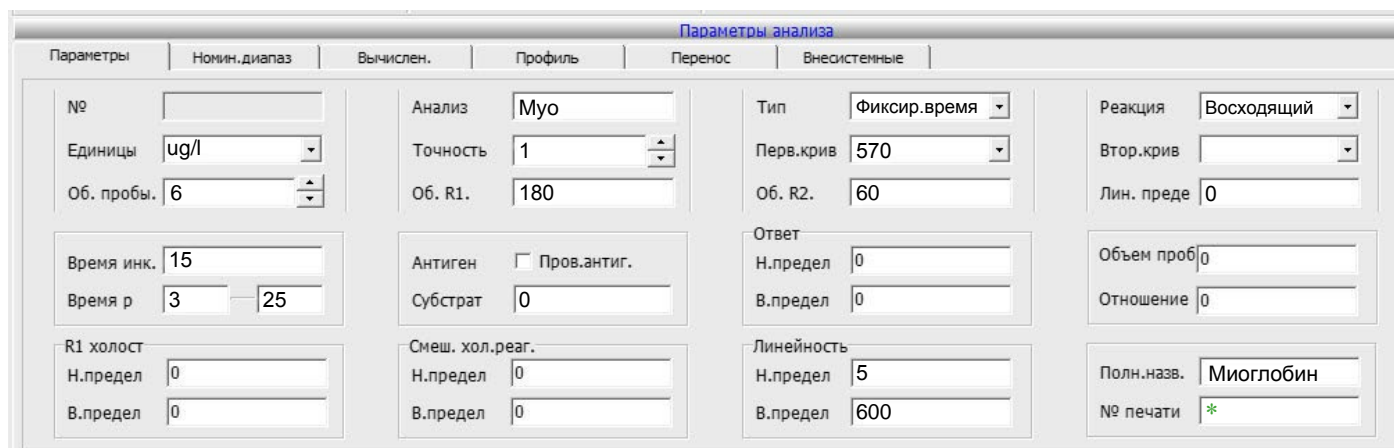

Параметры анализа

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

№

Единицы

Об. пробы.

Анализ

Точность

Об. R1.

Тип

Перв.крив

Об. R2.

Реакция

Втор.крив

Лин. преде

Время инк.

Время р

Антиген Пров.антиг.

Субстрат

Ответ

Н.предел

В.предел

Объем проб

Отношение

R1 холост

Н.предел

В.предел

Смеш. хол.реаг.

Н.предел

В.предел

Линейность

Н.предел

В.предел


Полн.назв.

№ печати

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

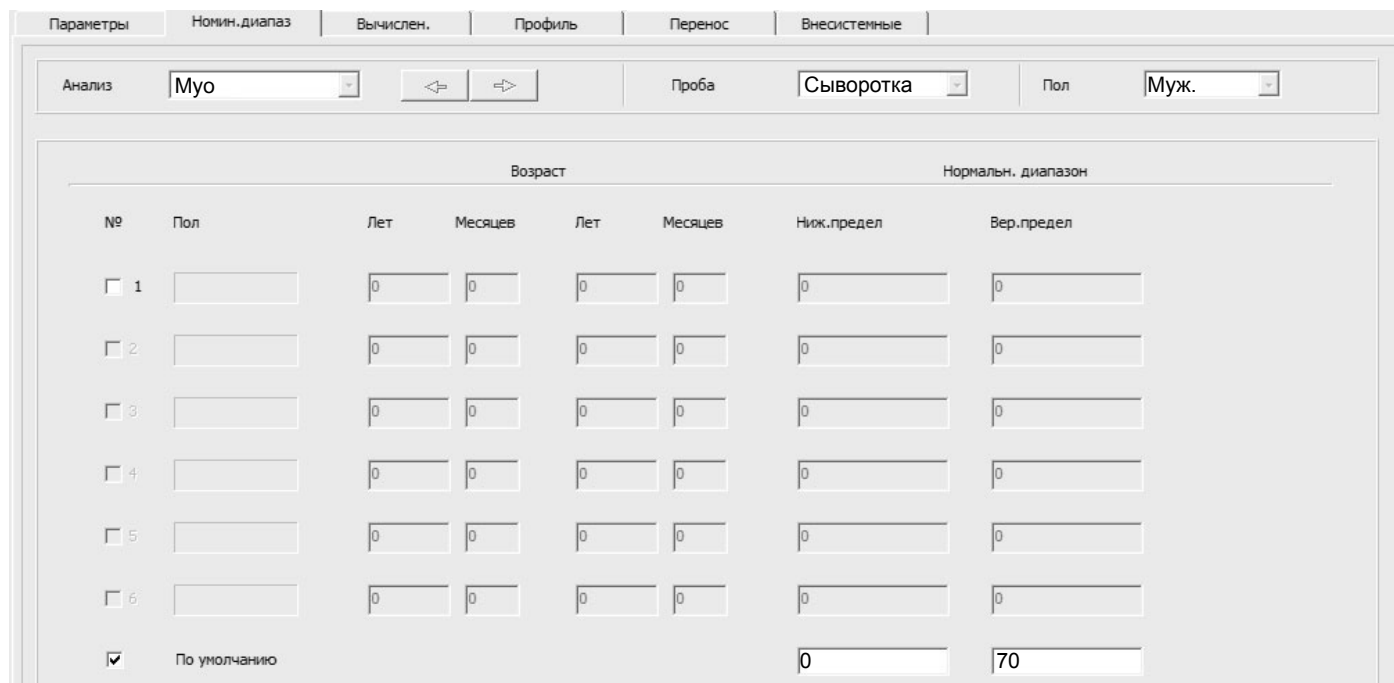

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ

Проба

Пол

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Вер.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 5	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 6	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="70"/>

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Панель параметров анализатора Mindray BS-300. Включает меню (Параметры, Номин.диапаз, Вычислен., Профиль, Перенос, Внеисстемные) и поля для выбора: Анализ (Мио), Проба (Сыворотка), Пол (Жен.).

№	Пол	Возраст				Нормальн. диапазон	
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					0	70

Панель параметров калибровки. Включает разделы: Правило (Метод: Logistic 5P) и Калибраторы.

Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
<input checked="" type="checkbox"/>	Myo-4	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	Myo-3	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	Myo-2	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	Myo-1	**	**	**
<input checked="" type="checkbox"/>	NaCl_0,9%	000	2020-01-01	0

Выбор
 Выбрано
 Просрочен

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Лог-лог5р, (сплайн) 5 точек (набор стандартов TruCal Myoglobin, 4 уровня + вода (или физраствор)).
 Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.