



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

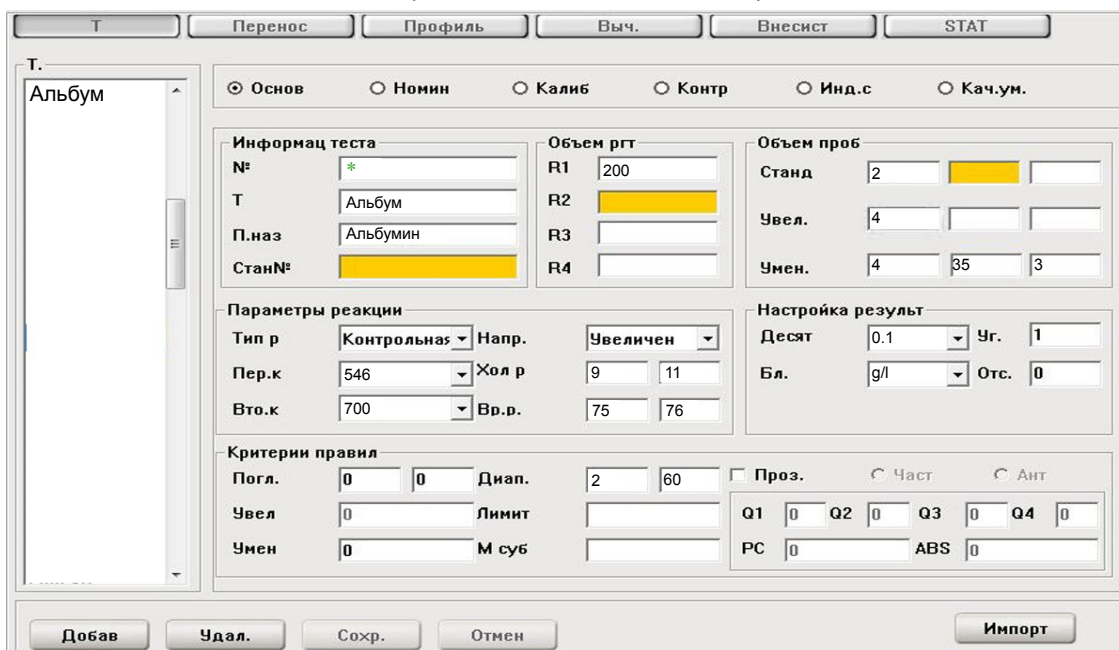

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

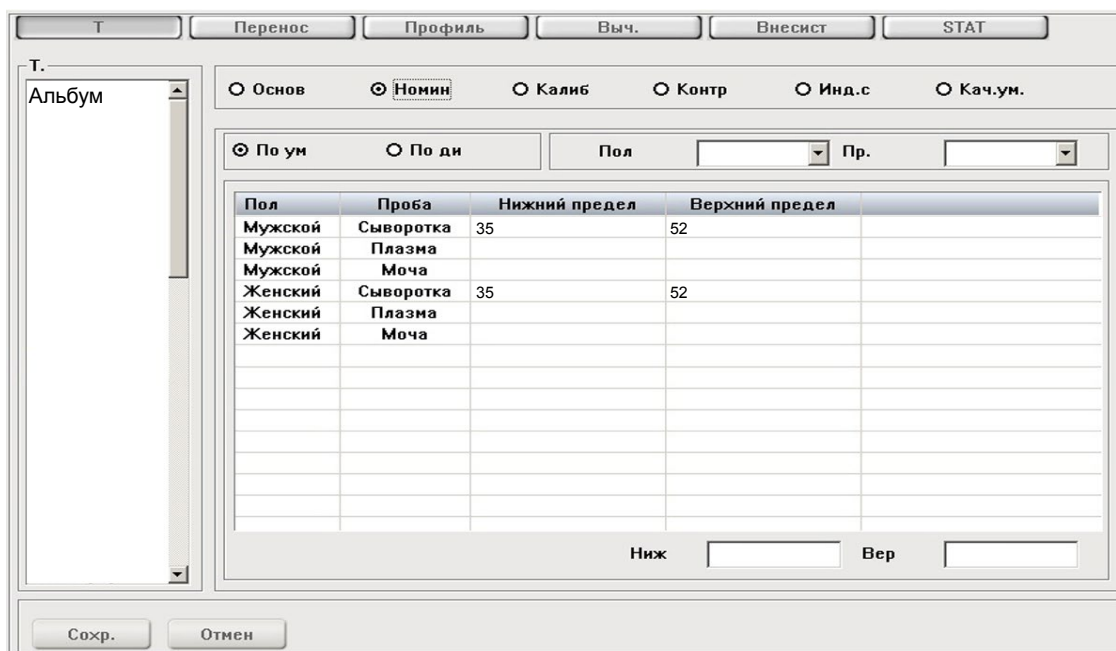

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	35	52
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	35	52
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

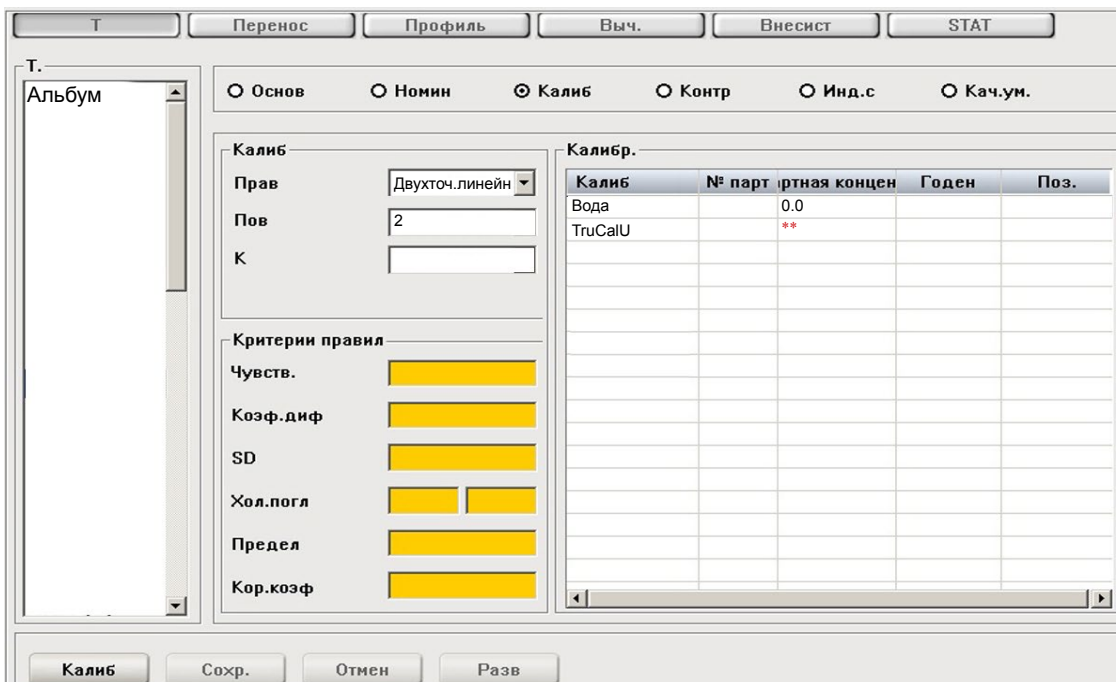

Т. Альбум

○ Основ ○ Нонин  Калиб ○ Контр ○ Инд.с ○ Кач.ум.

Калиб

Прав: Двухточ.линейн

Пов: 2

К:

Критерии правил

Чувств. [Yellow bar]

Козф. диф [Yellow bar]

SD [Yellow bar]

Хол.погл [Yellow bar]

Предел [Yellow bar]

Кор.коэф [Yellow bar]

Калиб	№ парт	Иртная концен	Годен	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

Калиб Сохр. Отмен Разв

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.