

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
IgE	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Проверка	IgE	
	Тип реакции	фикс.время	
	Пер	578	<input type="checkbox"/> X/п реар.
	Втор		Направл Ув.
	Задерж(с)	5	Об.Аспир.(мкл) 500
	Время изм.(с)	120	Темп 37
	Блок	МЕ/мл	Десятичн. 1
	Полное имя	Иммуноглобулин Е	
	Добав.	Удал.	Сохр.

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
IgE	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Эталон по умолч.	0	--- 100
	Лин.диапазон	10	--- 1000
	АБС х/п реар.		---
	Пред.поглощен.		
	Лин.предел(%)		
	<input type="button" value="По дифф"/>		
Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена Возвр.

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
IgE	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	<input type="radio"/> Коэффиц.К			
	<input checked="" type="radio"/> Правило	Log 5P		
	Повторить	2		
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	0	<input checked="" type="checkbox"/> S5	См.паспорт
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	См.паспорт	<input checked="" type="checkbox"/> S6	См.паспорт
	<input checked="" type="checkbox"/> S3	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S7	
	<input checked="" type="checkbox"/> S4	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S8	
	Добав.	Удал.	Сохр.	Отмена Возвр.