

Фосфолипиды

PAR, enzymatic (ферментативный метод)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: PHLIP	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Фосфолипиды	Он-лайн калиброе	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: mmol/l	Знаки п/запятой	: 2	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>
Основная дл. волны	: 570	Вспомогат.	: 700	Всего реагентов	: 2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: Linear	★ Реагент R1	: PHLIP R1
Нач. M1	: 21	Кон. M1	: 23	★ Реагент R2	: PHLIP R2
★ Нач. M2	: 60	★ Кон. M2	: 62		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2	<div style="text-align: center;">Задайте он-лайн калибровку</div> <div style="text-align: center;">DOWNLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">UPLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">УСТАН. АВТОПОВТОР</div> <div style="text-align: center;">КОПИР. ТЕСТ</div> <div style="text-align: center;">ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)</div>	
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0.09	Технич. максимум	: 13.3		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: PHLIP				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 2 μ l	Проп. развед.	: 1 X	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM	
Увелич.	: 5 μ l	Проп. развед.	: 1 X	<input type="checkbox"/> URINE	
Уменьш.	: 2 μ l	Проп. развед.	: 4 X	<input type="checkbox"/> CSF	
★ Объем стандарта	: 2 μ l			<input type="checkbox"/> PLASMA	
Объемы реагентов и скор. мешалки				<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD	
★ Объем R1	: 240 μ l	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	<input type="checkbox"/> OTHER	
★ Объем R2	: 60 μ l	★ Скор. мешалки R2	: Выс.		
КОПИР. ОБЪЕМЫ					
ПРОСМ. ОБЪЕМОВ					

Фосфолипиды

PAR, enzymatic (ферментативный метод)

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : PHLIP

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	1.61 3.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : PHLIP

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	1.61 3.55
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная калибратор Phospholipids standard.
Контроль по TruLab N и TruLab P или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !