

ГЛДГ (глутаматдегидрогеназа)

DGKC-1970



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Т. ГЛДГ

Основ Номин Калиб Контр

Информация теста

№: *
Т: ГЛДГ
П.наз: ГЛДГ
Стан№:

Объем ргг

R1: 160
R2: 40

Объем проб

Станд: 24
Увел.: 45
Умен.: 4

Параметры реакции

Тип р: Кинетически Напр.: Уменьшен
Пер.к: 340 Хол р: 0 0
Вто.к: 546 Вр.р.: 39 50

Настройка результат

Десят: 0.1 Уг.: 1
Бл.: U/L Отс.: 0

Критерии правил

Погл.: 0 0 Диап.: 2 120
Увел.: 0 Лимит:
Умен.: 0 М суб:

Проз. Част Ант

Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Т. ГЛДГ

Основ Номин Калиб Контр

По ум По дн Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	7
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	5
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

