

C-Реактивный белок (Uhs-универсальный)

ImmunoTD Uhs for U(Иммунотурбодиметрический с латексом, универсальный)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	5
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	5
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

C-Реактивный белок (Uhs-универсальный)

ImmunoTD Uhs for U (Иммунотурбодиметрический с латексом, универсальный)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCRP1		**		
TruCRP2		**		
TruCRP3		**		
TruCRP4		**		
TruCRP5		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal CRP-U

5 уровней + вода (физр-р).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab CRP уровень 1 и уровень 2.