


## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

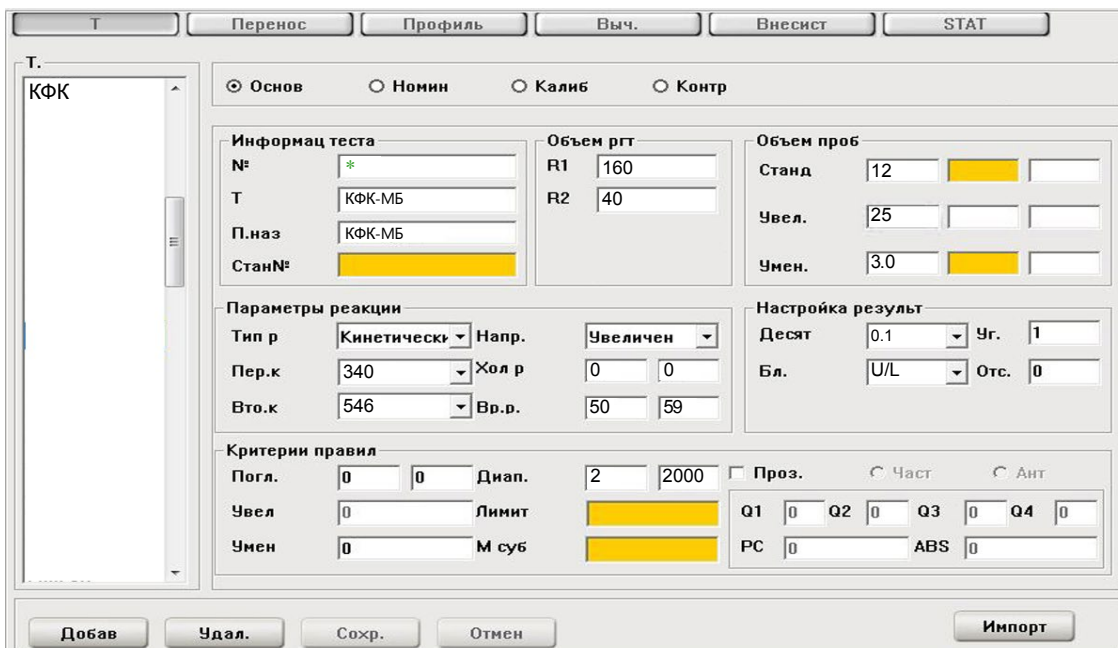

Т. КФК

Основ Номин Калиб Контр

Информац теста  
 № \*  
 Т КФК-МБ  
 П.наз КФК-МБ  
 Стан№

Объем ргг  
 R1 160  
 R2 40

Объем проб  
 Станд 12  
 Увел. 25  
 Умен. 3.0

Параметры реакции  
 Тип р Кинетически Напр. Увеличен  
 Пер.к 340 Хол р 0 0  
 Вто.к 546 Вр.р. 50 59

Настройка результат  
 Десят 0.1 Уг. 1  
 Бл. U/L Отс. 0

Критерии правил  
 Погл. 0 0 Диап. 2 2000  
 Увел 0 Лимит  
 Умен 0 М суб


Проз. Част Ант  
 Q1 0 Q2 0 Q3 0 Q4 0  
 PC 0 ABS 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

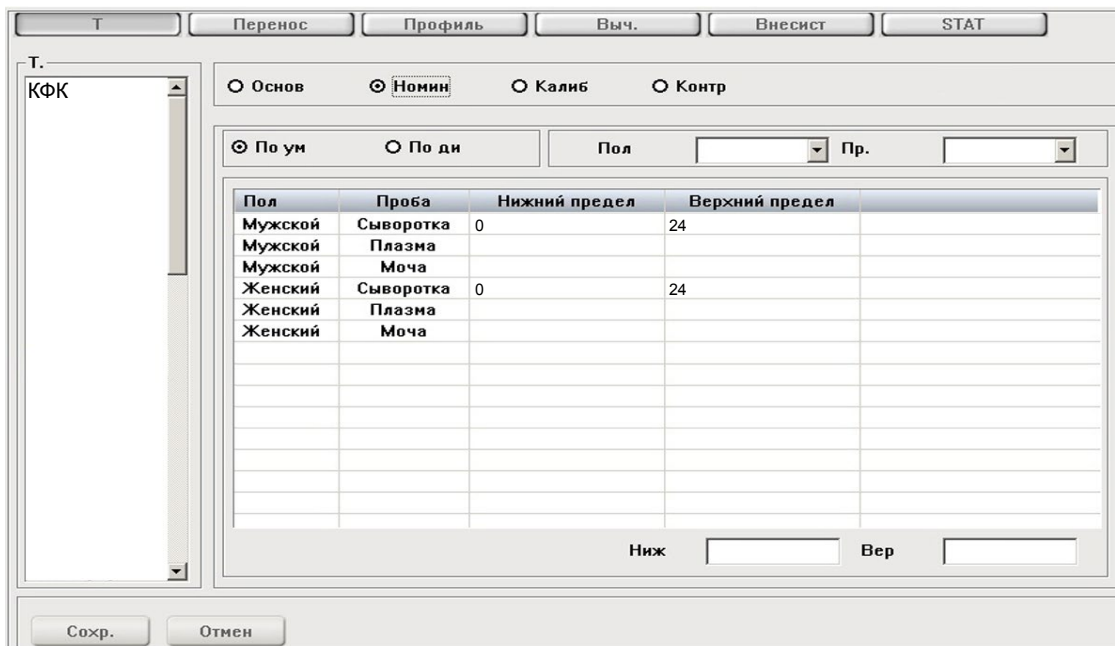

Т. КФК

Основ Номин Калиб Контр

По ум По дн Пол Пр.


Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	24
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	24
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж Вер

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

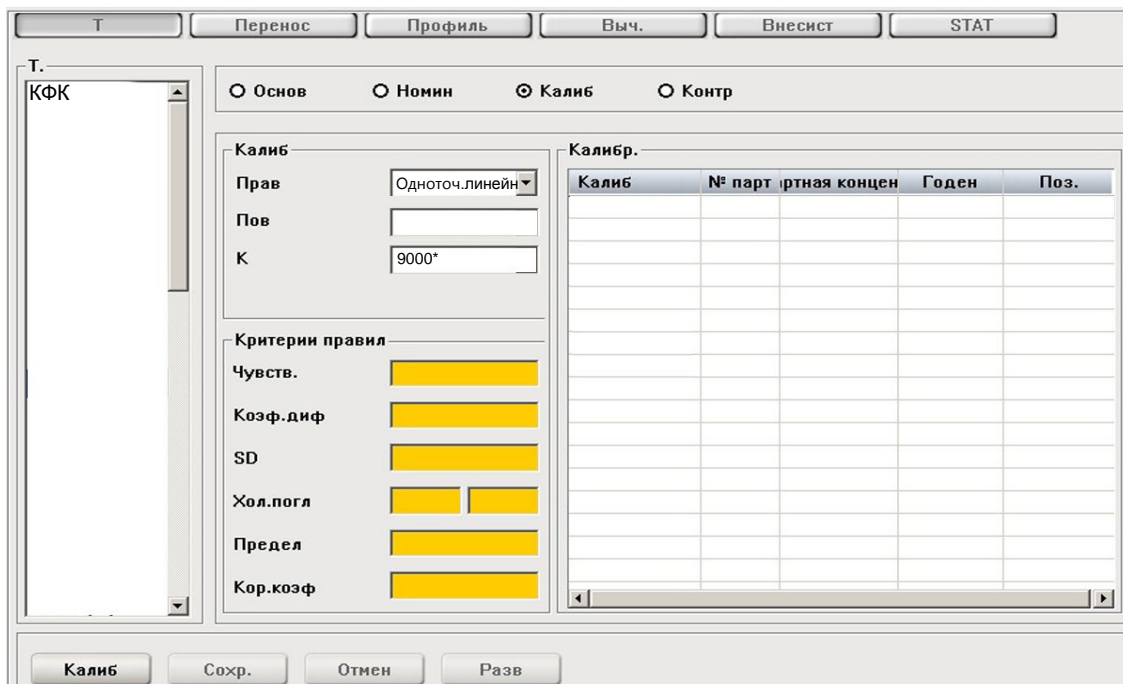

The screenshot shows the calibration configuration window for the Mindray BS-380 analyzer. At the top, there are navigation buttons: 'Т', 'Перенос', 'Профиль', 'Выч.', 'Внесист', and 'STAT'. Below these are radio buttons for 'Основ', 'Нонин', 'Калиб' (selected), and 'Контр'. The 'Калиб' section includes a dropdown menu for 'Прав' (set to 'Одноточ.линейн'), input fields for 'Пов' and 'К' (set to '9000\*'), and a 'Критерии правил' section with sliders for 'Чувств.', 'Козф. диф', 'SD', 'Хол.погл', 'Предел', and 'Кор.коэф'. To the right is a table for 'Калибр.' with columns: 'Калиб', '№ парт', 'ртная концен', 'Годен', and 'Поз.'. At the bottom are buttons for 'Калиб', 'Сохран.', 'Отмен', and 'Разв'.

Тип калибровки: линейная (Standard СК-МВ\*) или по фактору.

Контроль по TruLab N и TruLab P.

\* На регистрации.

\* Фактор следует уточнять по контрольным материалам.