

# Общий белок в моче

*Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)*



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
TP-Ur	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Проверка	TP-Ur	
	Тип реакции	конечн.точка	
	Пер	578	<input checked="" type="checkbox"/> X/п реаг.
	Втор		Направл <input type="text" value="Ув."/>
	Задерж(с)	10	Об.Аспир.(мкл) <input type="text" value="500"/>
	Время изм.(с)	6	Темп <input type="text" value="37"/>
	Блок	мг/л	Десятичн. <input type="text" value="1"/>
	Полное имя	Общий белок в моче	
	<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>		

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
TP-Ur	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	Эталон по умолч.	<input type="text" value="24"/>	---	<input type="text" value="141"/>
	Лин.диапазон	<input type="text" value="20"/>	---	<input type="text" value="3000"/>
	АБС х/п реаг.	<input type="text"/>	---	<input type="text"/>
	Пред.поглощен.	<input type="text"/>		
	Лин.предел(%)	<input type="text"/>		
	<input type="button" value="По дифф"/>			
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>				

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная	
TP-Ur	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК			
	<input type="radio"/> Коэффиц.К	<input type="text"/>		
	<input checked="" type="radio"/> Правило	2-точ.линейная		
	Повторить	2		
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> S5	<input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	См.паспорт	<input type="checkbox"/> S6	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> S3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> S7	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> S4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> S8	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			