

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: PCT	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Прокальцетонин	Он-лайн калибровк	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: ng/ml	Знаки п/запятой	: 0	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>
Основная дл. волны	: 660	Вспомогат.	: -----	Всего реагентов	: 2
Тип метода	: RATE-A	Тип калибровки	: 5p-logit-log	★ Реагент R1	: PCT R1
Нач. M1	: 0	Кон. M1	: 0	★ Реагент R2	: PCT R2
★ Нач. M2	: 31	★ Кон. M2	: 51		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Задайте он-лайн калибровку</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">DOWNLOAD TEST</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">UPLOAD TEST</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">УСТАН. АВТОПОВТОР</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">КОПИР. ТЕСТ</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; text-align: center;">ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)</div>	
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 0	Технич. максимум	: 35		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: PCT				
Тип пробы	: SERUM				
<b>Объемы проб</b>					
★ Норм.	: 12.5	µl	Проп. развед.	: 1	X
Увелич.	: 20	µl	Проп. развед.	: 1	X
Уменьш.	: 4	µl	Проп. развед.	: 1	X
★ Объем стандарта	: 9	µl			
<b>Объемы реагентов и скор. мешалки</b>					
★ Объем R1	: 150	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 50	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
<b>Типы проб</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> SERUM					
<input type="checkbox"/> URINE					
<input type="checkbox"/> CSF					
<input type="checkbox"/> PLASMA					
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD					
<input type="checkbox"/> OTHER					
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">КОПИР. ОБЪЕМЫ</div> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px;">ПРОСМ. ОБЪЕМОВ</div>					

# (PCT)

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : PCT

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	: 0                      0.5
Экстр.	: 0                      0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности    Объемы теста    **Контрольные интервалы**

Тест : PCT

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	: 0                      0.5
Экстр.	: 0                      0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Слайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal PCT 6 уровней, включая нулевой).

Контроль по TruLab PCT уровень 1 и уровень 2.