

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-240

Опред./правка химанализов

Хим. № Тип пробы

Химанализ Имя для печ

Тип реакции Направление реакции

Перв. д/в Втор. д/в

Ед.изм. Десятич

Время хол. Время инкубации

Время реакции

	Об. Пробы	Аспирировано	Разбавитель	Объем реаг.
Стандарт	<input type="text" value="4"/> uL	<input type="text"/> uL	<input type="text"/> uL	P1 <input type="text" value="200"/> uL
Понижен.	<input type="text" value="2"/> uL	<input type="text"/> uL	<input type="text"/> uL	P2 <input type="text"/> uL
Повышенный	<input type="text" value="8"/> uL	<input type="text"/> uL	<input type="text"/> uL	

Холост.проб Автоповтор

Печать F1 Отражение F2 ФЛАГ F3 Пред F4 След F5 Отбросить F6 Сохран F7 Закрыть F8

Опред./правка химанализов

Хим. № Тип пробы

Химанализ Имя для печ

Диап.линейности(стандарт)	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="3000"/>	Предел линейности	<input type="text"/>
Диап.линейности(уменьш.)	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="6000"/>	Истощение субстрата	<input type="text"/>
Диап.линейности(увелич.)	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1500"/>	Смеш.хол.логл.	<input type="text" value="-4000"/> <input type="text" value="4000"/>
Поглощ.хол.Р1	<input type="text" value="-4000"/>	<input type="text" value="4000"/>	Стабильность реагента в аппарате	<input type="text"/> Дней
Отклик холост.	<input type="text" value="-4000"/>	<input type="text" value="4000"/>	Предел тревог по реаг.	<input type="text" value="10"/>
Парн.химанализ	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Линейное расширение фермента	

Проверка прозоны Пров.скорости

Q1 Q2 Q3 Q4 PC ABS

Пред.обработка проб

Предварительная обработка калибратора Объем образца для предварительной обработки uL

Предварительная обработка средств управления Объем реагента для предварительной обработки uL

Печать F1 Отражение F2 ФЛАГ F3 Пред F4 След F5 Отбросить F6 Сохран F7 Закрыть F8

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

Установка калибровки

Хим.

Настройки калибровки

Мат.модель

Коэфф. Повторы

Допустимые пределы

Врем.кал. час

Разн.накл. SD

Чувств. Воспроизв.

Коэфф. дет.

Автокалибровка

Флак.заменен Парт.замен Врем.кал

Калибратор	Конц	Поз	№ парт
Вода	0.00	**	
TPur	*	**	

* -Водится из паспорта к калибратору. ** -Выбирается пользователем.

Тип калибровки: Линейная, калибратор Total protein UC standard или по стандарту из набора. Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2.

Референт./критич.диапазон

Прогр. Ед.изм. Пол

Диап.возр. лет
 Реф.диап.
 Критич.диап.

Тип пробы	Пол	Диап.возр.	Реф.диап.	Критич.диап.	Ед.изм.
Сывор	Муж.	0лет - 100лет	24 - 141		mg/L
Сывор	Жен.	0лет - 100лет	24 - 141		mg/L

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору