


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

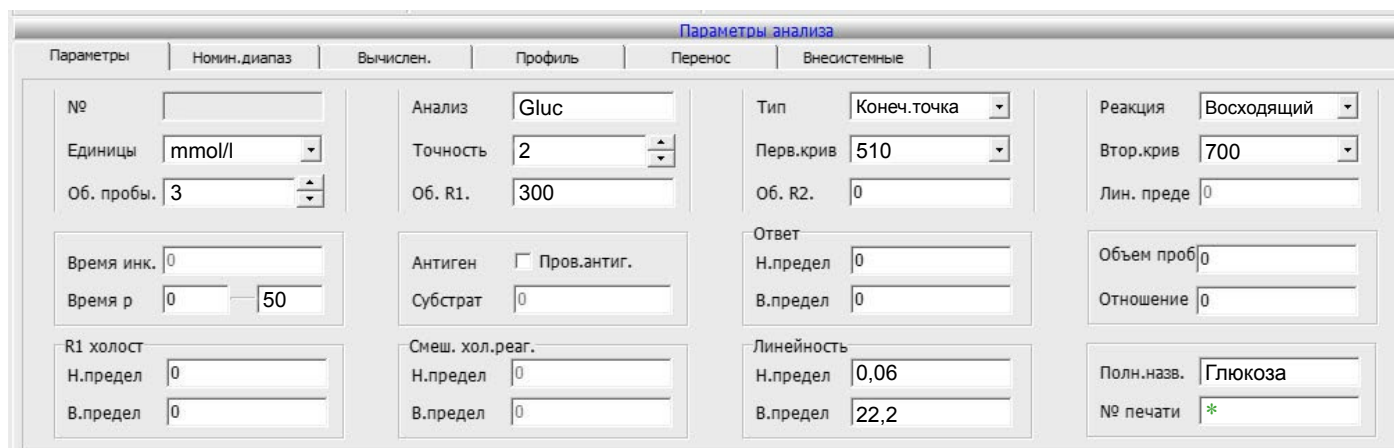

Параметры анализа

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

№

Единицы

Об. пробы.

Анализ

Точность

Об. R1.

Тип

Перв.крив

Об. R2.

Реакция

Втор.крив

Лин. преде

Время инк.

Время р

Антиген Пров.антиг.

Субстрат

Ответ

Н.предел

В.предел

Объем проб

Отношение

R1 холост

Н.предел

В.предел

Смеш. хол.реаг.

Н.предел

В.предел

Линейность

Н.предел

В.предел


Полн.назв.

№ печати

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

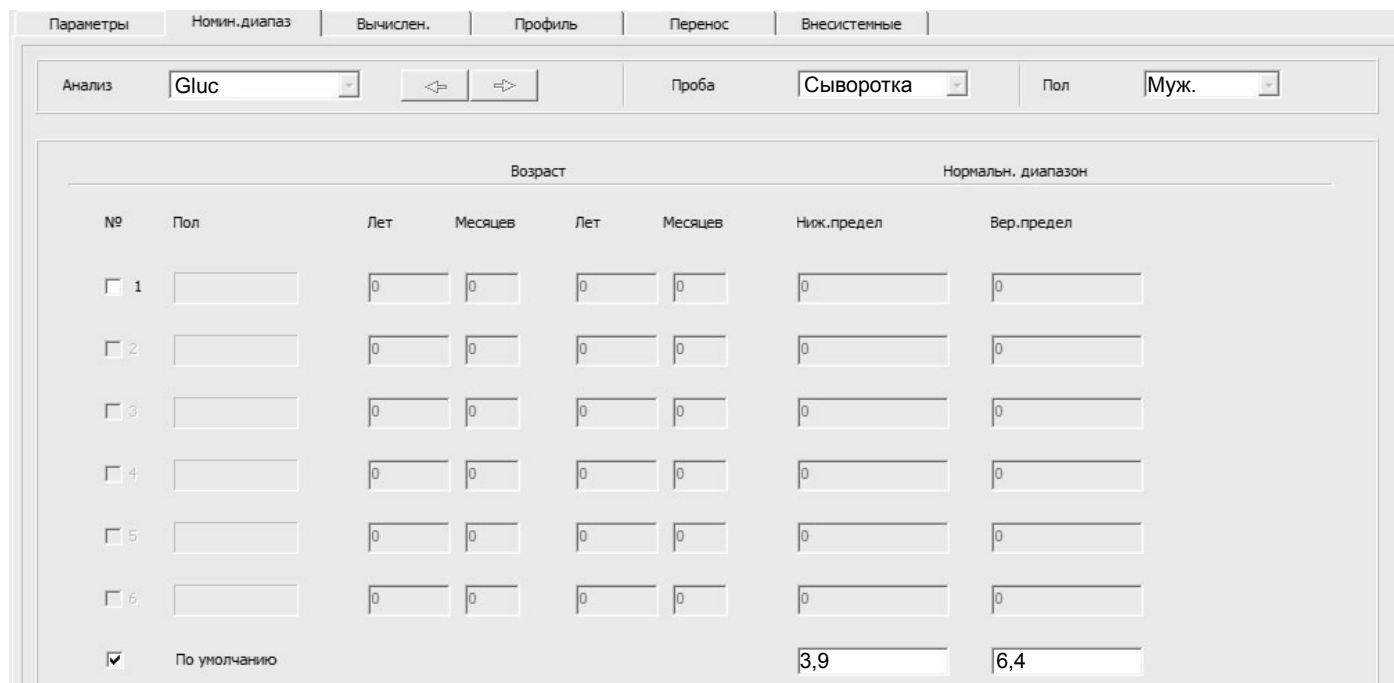

Параметры | Номин.диапаз | Вычислен. | Профиль | Перенос | Внесистемные

Анализ

Проба Пол

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон		Ниж.предел	Вер.предел
		Лет	Месяцев	Лет	Месяцев		
<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 5	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> 6	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="3,9"/>	<input type="text" value="6,4"/>

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Номин.диапаз		Вычислен.		Профиль		Перенос		Внесистемные	
Анализ	Gluc							Проба	Сыворотка	Пол	
										Жен.	
						Возраст			Нормальн. диапазон		
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел				
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0	0	0				
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0	0	0				
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					3,9	6,4				

Правило				Калибраторы				
Метод	Лин.(двухточ.)			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	0			<input checked="" type="checkbox"/>	TruCalU	**	**	**
Экземпляры	2			<input checked="" type="checkbox"/>	Water	000	2020-01-01	0
Интервал	0							
Чувствительность	0							
Определение коэффициента	0							
	Предел ошиб. для повт. обраб.							
	Холостой ответ							
	Предел различий							
	SD							
				<input type="checkbox"/> Выбор <input checked="" type="checkbox"/> Выбрано <input type="checkbox"/> Просрочен				

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно