

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест	: TPU	Автоповтор
Наим. отчёта	: ОбщийБелок мочи	Он-лайн калибровк:
Ед.	: mg/l	Знаки п/запятой
Основная дл. волны	: 600	Вспомогат.
Тип метода	: 1POINT	Тип калибровки
Нач. M1	: 0	Кон. M1
★ Нач. M2	: 60	★ Кон. M2
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.
Технич. минимум	: 20	Технич. максимум
Y=aX+b	a= 1	b= 0
		★ Реагент R1
		: TPU R1

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест	: TPU	
Тип пробы	: SERUM	
Объемы проб		Типы проб
★ Норм.	: 4.0 µl	Проп. развед.
Увелич.	: 8.0 µl	Проп. развед.
Уменьш.	: 2.0 µl	Проп. развед.
★ Объем стандарта	: 4.0 µl	
Объемы реагентов и скор. мешалки		
★ Объем R1	: 200 µl	★ Скор. мешалки R1
		: Выс.

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогалловым красным)

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : TPU

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0	150	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input checked="" type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : TPU

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	: 0	150	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input checked="" type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	: 0	0	

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Линейная (Total protein UC standard (Стандарт общего белка в моче) или стандарт из набора (если есть)).

Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !