

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
Myogl	<input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кап <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Проверка	Myogl	
	Тип реакции	фикс.время	
	Пер	578	<input type="checkbox"/> X/п реаг.
	Втор		Направл <input type="text" value="Ув."/>
	Задерж(с)	5	Об.Аспир.(мкл) <input type="text" value="500"/>
	Время изм.(с)	300	Темп <input type="text" value="37"/>
	Блок	мкг/л	Десятичн. <input type="text" value="0,1"/>
	Полное имя	Миоглобин	
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
Myogl	<input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кап <input type="radio"/> Свед.о КК		
	Эталон по умолч.	<input type="text" value="0"/>	--- <input type="text" value="70"/>
	Лин.диапазон	<input type="text" value="35"/>	--- <input type="text" value="600"/>
	АБС х/п реаг.	<input type="text"/>	--- <input type="text"/>
	Пред.поглощен.	<input type="text"/>	
	Лин.предел(%)	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="По дифф"/>		
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			

Стандартная	Профиль	Вычисления	Внесистемная
Myogl	<input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кап <input type="radio"/> Свед.о КК		
	<input type="radio"/> Коэффиц.К	<input type="text"/>	
	<input checked="" type="radio"/> Правило	Log 5P	
	Повторить	<input type="text" value="2"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> S1	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S5 <input type="text" value="См.паспорт"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> S2	<input type="text" value="См.паспорт"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S6 <input type="text" value="См.паспорт"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> S3	<input type="text" value="См.паспорт"/>	<input type="checkbox"/> S7 <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> S4	<input type="text" value="См.паспорт"/>	<input type="checkbox"/> S8 <input type="text"/>
<input type="button" value="Добав."/> <input type="button" value="Удал."/> <input type="button" value="Сохран."/> <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Возв."/>			