

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

Т. БилПр

Основ Номин Калиб Контр

Информация теста

№: *
Т: БилПр
П.наз: Прямой билирубин
Стан№:

Объем ргг

R1: 160
R2: 40

Объем проб

Станд: 16
Увел.: 32
Умен.: 8

Параметры реакции

Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен
Пер.к: 546 Хол р: 32 34
Вто.к: 660 Вр.р.: 58 60

Настройка результат

Десят: 0.1 Уг.: 1
Бл.: umol/l Отс.: 0

Критерии правил

Погл.: 0 0 Диап.: 0 170
Увел.: 0 Лимит:
Умен.: 0 М суб:

Проз. Част Ант

Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Т. БилПр

Основ Номин Калиб Контр

По ум По дн Пол: Пр.:


Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0	3.4
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	0	3.4
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

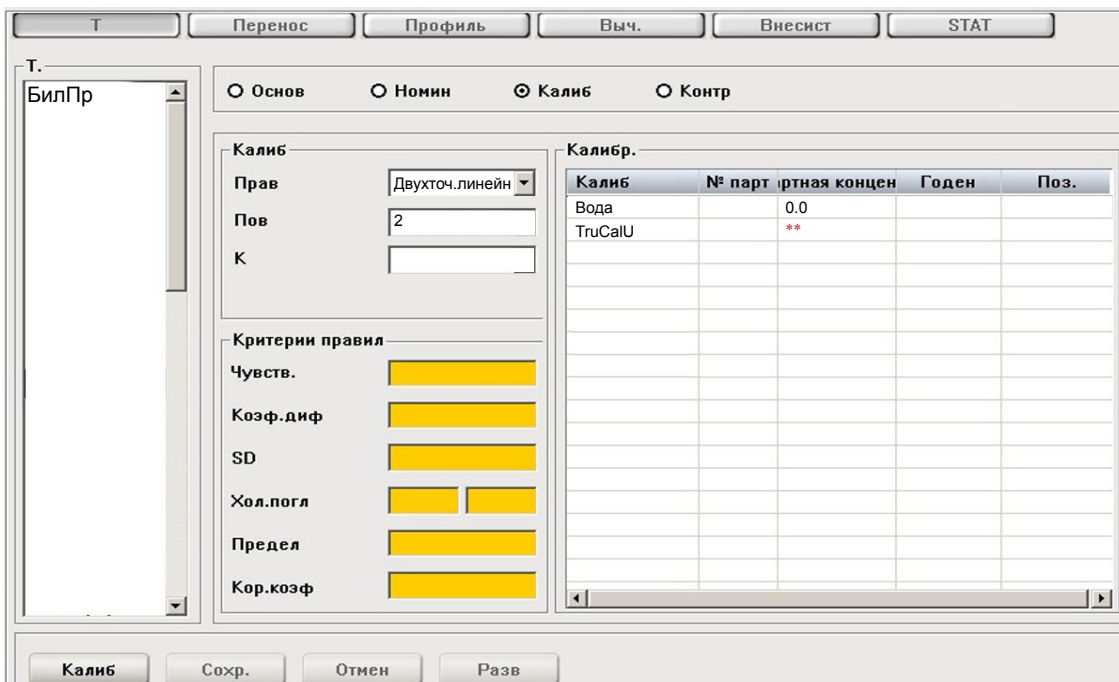

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
Вода		0.0		
TruCalU		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).
Контроль по TruLab N и TruLab P.