

Липопротейн (а)

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
★ Тест	: LPA21	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>		
Наим. отчёта	: Липопротейн (а)	Он-лайн калиброе	: <input type="checkbox"/>		
Ед.	: mg/l	Знаки п/запятой	: 1	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>
Основная дл. волны	: 700	Вспомогат.	: -----	Всего реагентов	: 2
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки	: 5p-logit-log	★ Реагент R1	: LPA21 R1
Нач. M1	: 20	Кон. M1	: 21	★ Реагент R2	: LPA21 R2
★ Нач. M2	: 33	★ Кон. M2	: 34		
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2	<div style="text-align: center;">Задайте он-лайн калибровку</div> <div style="text-align: center;">DOWNLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">UPLOAD TEST</div> <div style="text-align: center;">УСТАН. АВТОПОВТОР</div> <div style="text-align: center;">КОПИР. ТЕСТ</div> <div style="text-align: center;">ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)</div>	
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0		
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0		
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: .		
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0		
Технич. минимум	: 30	Технич. максимум	: 1100		
Y=aX+b	a= 1	b= 0			

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: LPA21				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 4.5	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 9	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 3	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта	: 4.5	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 180	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
★ Объем R2	: 90	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	<input type="checkbox"/> OTHER
КОПИР. ОБЪЕМЫ					
ПРОСМ. ОБЪЕМОВ					

Липопротейн (а)

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подобности Объёмы теста Контрольные интервалы

Тест : LPA21

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	: 0	300
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подобности Объёмы теста Контрольные интервалы

Тест : LPA21

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал		
	Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	: 0	300
Экстр.	: 0	0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal Lp(a), 5 уровней + вода или физраствор).

Контроль по TruLab Lp(a) уровень 1 и уровень 2

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !