

Аполипротеин А1

ИтипоTD (Иммунотурбодиметрический)



Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Определение теста

Thermo SCIENTIFIC **АпоА1**

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип теста: Фотометрический

Тест в работе: ДА

Полное имя: Аполип.А1

Сетевое имя: *

Границы: мг/дл

Кол-во знаков: 0

Подтверждение: Автомат.

Разведение 1 +: 0

Тип образца: Сыворотка Плазма Моча СМЖ Другие

Дата коррекции

Мин Макс

Предел теста: 0 500 мг/дл

Начальн. абс: 0 3.000 А

Предел разв-я: * 250 мг/дл

Вторич раз-е 1 +: 0.0 1

Гран.норм	Мин	Макс	Ед.	В работе
Жен	120	190	мг/дл	ДА
Муж	110	170	мг/дл	ДА

Гран.норм	Мин	Макс	В работе
			ДА

Коррекция фактора: 1

Коррекция смещ.: 0 мг/дл Далее >>

F1 Новый тест F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Калибр. парам. F6 КК парам. F7 Тест дозир. F8 --далее--

* Сетевое имя вводится в соответствии с настройками LIS/HIS. Если передача данных не требуется, поле можно оставить пустым.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя. При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Дозировка

Thermo SCIENTIFIC **АпоА1**

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Фон: Да

Избыток антиг.: НЕТ

Кювета обычная

Дозируемый объем

Реактив	Образец	Инкубация	Кон.точка	Реактив	Инкубация	Кон.точка
Реактив: АрAD_1 Объем (мкл): 200	Объем (мкл): 2	Время (сек.): 180	Фон	Реактив: АрAD_2 Объем (мкл): 40	Время (сек.): 300	Длина волны (нм): 575 nm Дополн. длина: *
Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 10	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8		Ответ мин. (А): * Ответ макс. (А): 0.8	Диспенсир. с: Экстра Объем (мкл): 8		Тип измерения: Норм.
Моющий раствор: [Нет]	Разбавл-е с: Вода Моющий раствор: [Нет]			Моющий раствор: [Нет]		

F1 F2 Сохранить F3 Отменить F4 Выбор теста F5 Тесты F6 Предварит этап F7 Стереть следующие F8

Параметры для ввода в программу анализаторов серии Konelab

Параметры калибровки

Thermo SCIENTIFIC АпоА1

Образцы → Данные → Реактивы → Меню →

Тип калибровки	Нелинейный	Фактор		Смещение																						
Повтор через (д)	0	Абс. ошибка (мА)	*	Использ. корр.	НЕТ																					
Точки/Калибр.	Двойная	Относит. ошибка (%)	*	Коррекция смещ. время повт. (дд:чч)																						
Подтверждение	Ручной	Предел абс-ции (мА)		Предел смещения (мА)																						
Направление кривой	Нарастание	Мин	*	Общее количество																						
Тип калибр.	Одиночный	Макс	*	Увеличенный																						
Калибраторы		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Стандарт</th> <th>Конц.</th> <th>коэф. разв.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NaCl 0.9%</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>ТсАрА/В-1</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>ТсАрА/В-2</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>ТсАрА/В-3</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>ТсАрА/В-4</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>ТсАрА/В-5</td> <td>**</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>		Стандарт	Конц.	коэф. разв.	NaCl 0.9%	0	0.0	ТсАрА/В-1	**	0.0	ТсАрА/В-2	**	0.0	ТсАрА/В-3	**	0.0	ТсАрА/В-4	**	0.0	ТсАрА/В-5	**	0.0	Код смещения std	
Стандарт	Конц.	коэф. разв.																								
NaCl 0.9%	0	0.0																								
ТсАрА/В-1	**	0.0																								
ТсАрА/В-2	**	0.0																								
ТсАрА/В-3	**	0.0																								
ТсАрА/В-4	**	0.0																								
ТсАрА/В-5	**	0.0																								
Концентрация																										
Коеф. разв. 1 +																										

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Сохранить Отменить Выбор теста Тесты Калибр. КК Стандарты КК --далее--

** -вводится из паспорта к калибратору

ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак **точки** !

В данной версии адаптации в качестве разбавителя образцов используется вода. При необходимости в меню «Тест дозирование» выберите другой тип разбавителя.

В связи с техническими особенностями анализатора соотношение образца и реагента в данной адаптации изменено относительно инструкции.

Набор стандартов TruCal Apo A1-B (5 уровней)+ вода (или физраствор).

Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и TruLab P.