



## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

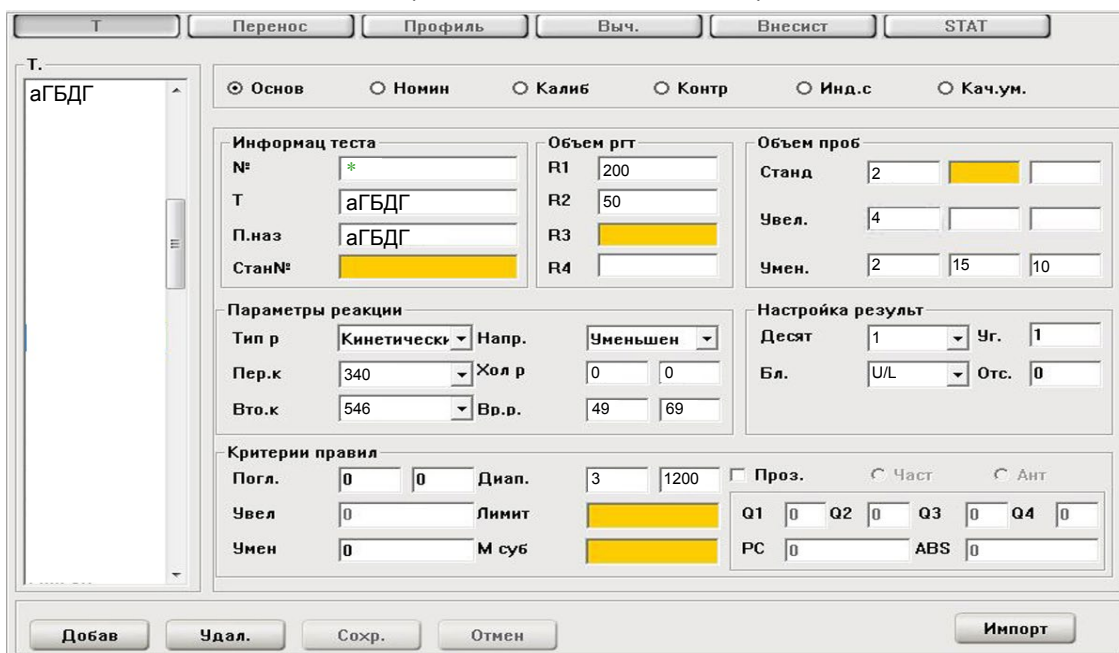

\* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами


Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

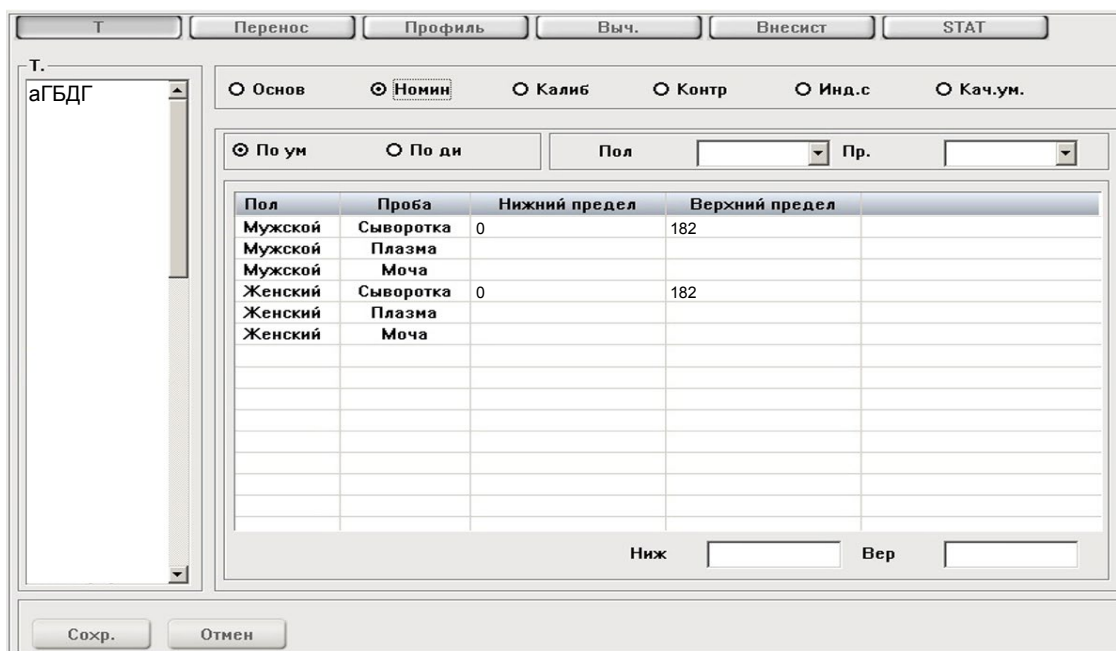

| Пол     | Проба     | Нижний предел | Верхний предел |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| Мужской | Сыворотка | 0             | 182            |
| Мужской | Плазма    |               |                |
| Мужской | Моча      |               |                |
| Женский | Сыворотка | 0             | 182            |
| Женский | Плазма    |               |                |
| Женский | Моча      |               |                |

## Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

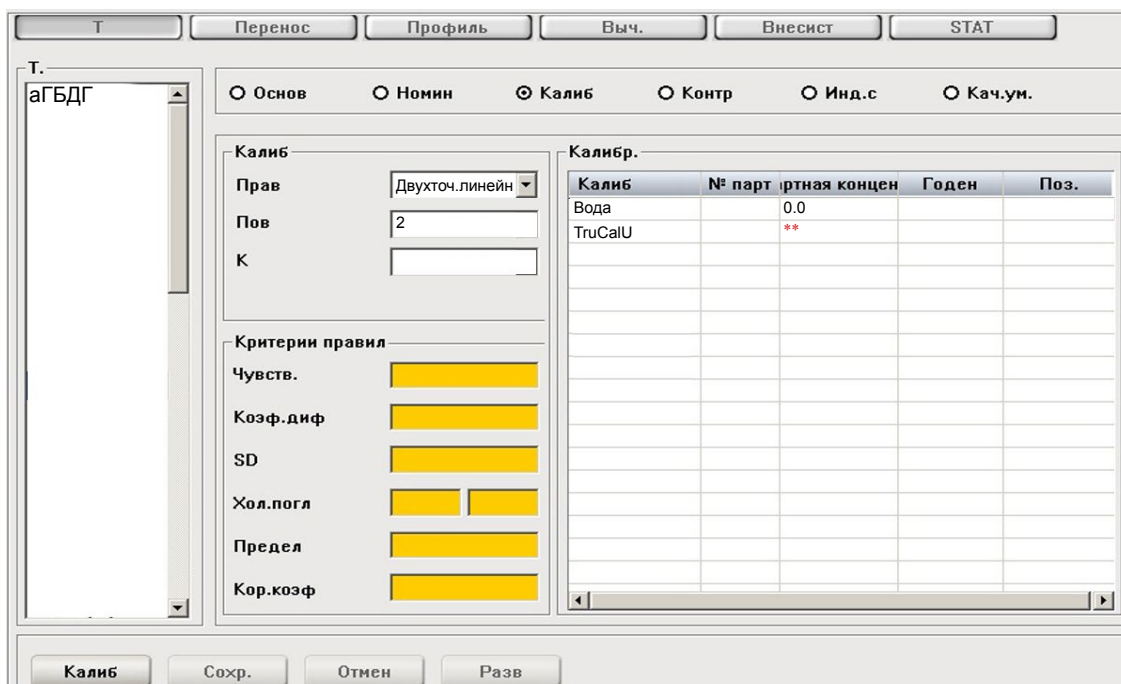

| Калиб   | № парт | ртная концен | Годеп | Поз. |
|---------|--------|--------------|-------|------|
| Вода    |        | 0.0          |       |      |
| TruCalU |        | **           |       |      |

\*\* - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр. кач.» соответственно.

Тип калибровки: Двухточечная линейная, (калибратор TruCalU) или по фактору.  
Контроль по TruLab N и TruLab P.