

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BA-88

| | | | |
|-------------|---|------------------|---|
| Стандартная | Профиль | Вычисления | Внесистемная |
| IgM | <input checked="" type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК | | |
| | Проверка | IgM | |
| | Тип реакции | конечн.точка | |
| | Пер | 405 | <input checked="" type="checkbox"/> X/п реар. |
| | Втор | 630 | Направл |
| | Задерж(с) | 10 | Об.Аспир.(мкл) |
| | Время изм.(с) | 6 | Темп |
| | Блок | мг/дл | Десятичн. |
| | Полное имя | Иммуноглобулин М | |
| | Добав. | Удал. | Сохр. |

| | | | |
|-------------|---|------------|--------------|
| Стандартная | Профиль | Вычисления | Внесистемная |
| IgM | <input type="radio"/> Основной <input checked="" type="radio"/> Огранич. <input type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК | | |
| | Эталон по умолч. | 40 | 230 |
| | Лин.диапазон | 25 | 800 |
| | АБС х/п реар. | | |
| | Пред.поглощен. | | |
| | Лин.предел(%) | | |
| | <input type="button" value="По дифф"/> | | |
| Добав. | Удал. | Сохр. | Отмена |

| | | | | |
|-------------|---|------------|--|------------|
| Стандартная | Профиль | Вычисления | Внесистемная | |
| IgM | <input type="radio"/> Основной <input type="radio"/> Огранич. <input checked="" type="radio"/> Данн.кал <input type="radio"/> Свед.о КК | | | |
| | <input type="radio"/> Коэффиц.К | | | |
| | <input checked="" type="radio"/> Правило | Log 5P | | |
| | Повторить | 2 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S1 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> S5 | См.паспорт |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S2 | См.паспорт | <input checked="" type="checkbox"/> S6 | См.паспорт |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S3 | См.паспорт | <input type="checkbox"/> S7 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S4 | См.паспорт | <input type="checkbox"/> S8 | |
| | Добав. | Удал. | Сохр. | Отмена |

ВАЖНО для данного теста стоит использовать X/П образца