

Общий белок в моче

Pyrogallol red (метод с пирогаллоловым красным)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> СИРy	**

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная (Total protein UC standard (Стандарт общего белка в моче) или стандарт из набора (если есть)).
Контроль по TruLab Urine уровень 1 и уровень 2.