

Ферритин

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Тип реакции **ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ**

Метод	Ferrit	Название	Ферритин	Маркир.	
Тип образца	Сыворотка	Ед.	мкг/л	Десят-ые	0
Штрих-код		Версия			

Главное меню

Количественный

Ограничения

Контр.класс

Перемещенный вперед

Длина волны (нм)

Главное меню

☐ Боковой

Считываемые показатели

Инкубация (сек)

☒ Доп. точность

Время реакции (сек)

Подача

Изделие	Объем (мкл)	Время (сек)	Разлить при помощи	Доп. объем (м KitVol (ul))
Образец	6	60		
1-й реагент	120	0	☒ Дополнитель	10
☒ 2-й реагент	60	300	☒ Дополнитель	5
☐ 3-й реагент				

Разбавитель образца

☐ Используйте дополн

☐ Предварительное разбавл

Фактор

Инкубация

Главное меню

Количественный

Ограничения

Контр.класс

Перемещенный вперед

Преобразование единиц

Фактор

Смещение

Тип калибровки

☒ Кривая/линейная

☐ Время действительности (μ

☒ Фиксированные точки

Обязательная формула

☐ Фактор

Фактор

☐ Используйте из данной мето

Направление

☐ Проверка направления

Бланк реагента

☐ Введено в действие

Замена образа при помощи

Разбавитель

Время действитель

Часы

Копии по умолчанию

☐ Выполнен автоматически

Параметры для ввода в программу анализатора Numastar-600

Главное меню
Количественный
Ограничения
Контр.класс
Перемещенный вперед

Пределы действительности концентрации

Низкий Больше образ ▾

Высокий Предваритель ▾

Автоматическое утверждение бланка реагента

☐ Нижн. пред.

☐ Верхний пред.

Проверка целостности ограничений абсорбции

☐ Нижн. пред.

☐ Верхний пред.

Автоматический прием фактора калибровки

☐ Нижн. пред.

☐ Верхний пред.

☐ % замены

Пределы дублирования концентрации

☐ Нижн. пред.

☐ Верхний пред.

Главное меню
Количественный
Ограничения
Контр.класс
Перемещенный вперед

Идентиф.	Низкий	Высокий
Female	15	150
Male	30	400

Для страниц «Перемещенный вперед» и «Замена» оставить значения по умолчанию.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.