

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

Итипо (прямой иммуно)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Т. ЛПВП

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

Информац теста

№: *
Т: ЛПВП
П.наз: ЛПВП
Стан№: *

Объем ргг

R1: 200
R2: 50
R3: *
R4:

Объем проб

Станд: 2
Увел.: 4
Умен.: 4 35 3

Параметры реакции

Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен
Пер.к: 605 Хол р: 40 41
Вто.к: 700 Вр.р.: 77 79

Настройка результат

Десят: 0.01 Уг.: 1
Бл.: mmol/l Отс.: 0

Критерии правил

Погл.: 0 0 Диап.: 0.03 4.7
Увел.: 0 Лимит:
Умен.: 0 М суб:

Проз. Част Ант

Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Т. ЛПВП

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

По ум По дн

Пол: Пр.:

Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	0.9	4.7
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	1.0	4.7
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

ЛПВП (липопротеины высокой плотности)

Итипо (прямой иммуно)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalL		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: линейная (калибратор TruCal HDL/LDL).

Контроль по TruLab N и TruLab P, или по TruLab L (липидный) уровень 1 и уровень 2.