

Креатинкиназа МБ

IFCC, DGKCopt., Immunoinhibition mAK (с иммуноингибированием)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры анализа

№	Анализ	Тип	Реакция
Единицы	Точность	Перв.крив	Втор.крив
Об. пробы.	Об. R1.	Об. R2.	Лин. преде
Время инк.	Антиген	Ответ	Объем проб
Время р	Субстрат	Н.предел	Отношение
R1 холост	Смеш. хол.реаг.	Линейность	Полн.назв.
Н.предел	Н.предел	Н.предел	№ печати
В.предел	В.предел	В.предел	

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Параметры

Анализ: СК-МВ Проба: Сыворотка Пол: Муж.

№	Пол	Возраст		Нормальн. диапазон	
		Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел
<input type="checkbox"/> 1		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 2		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 3		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 4		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 5		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 6		0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию			0	24

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-300

Параметры		Номин.диапаз	Вычислен.	Профиль	Перенос	Внесистемные																																																																	
Анализ	СК-МВ	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>	Проба	Сыворотка	Пол	Жен.																																																																
<p style="text-align: center;">Возраст</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Пол</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Лет</th> <th>Месяцев</th> <th>Ниж.предел</th> <th>Вер.предел</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/> 1</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 2</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 3</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 4</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 5</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/> 6</td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>По умолчанию</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="0"/></td> <td><input type="text" value="24"/></td> </tr> </tbody> </table>				№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел	<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="24"/>	<p style="text-align: center;">Нормальн. диапазон</p>			
№	Пол	Лет	Месяцев	Лет	Месяцев	Ниж.предел	Вер.предел																																																																
<input type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																
<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																
<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																
<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																
<input type="checkbox"/> 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																
<input type="checkbox"/> 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																																
<input checked="" type="checkbox"/>	По умолчанию					<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="24"/>																																																																

Правило				Калибраторы				
Метод	Лин.(двухточ.)			Выбрано	Калибратор	№ партии	Годен до	Уровень
Коэфф.К	<input type="text" value="0"/>	Экземпляры	<input type="text" value="2"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TC_СКМВ	**	**	**
Интервал	<input type="text" value="0"/>	Предел ошиб. для повт. обраб.	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Water		2020-01-01	0
Чувствительность	<input type="text" value="0"/>	Холостой ответ	<input type="text" value="0"/>					
Определение коэффициента	<input type="text" value="0"/>	Предел различий	<input type="text" value="0"/>					
		SD	<input type="text" value="0"/>					

Выбор
 Выбрано
 Просрочен

******-вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (Standard СК-МВ*) или по фактору.
Контроль по TruLab N и TruLab P.

* На регистрации.