

Липопротейн (а)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

| Пол | Проба | Нижний предел | Верхний предел |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| Мужской | Сыворотка | 0 | 300 |
| Мужской | Плазма | | |
| Мужской | Моча | | |
| Женский | Сыворотка | 0 | 300 |
| Женский | Плазма | | |
| Женский | Моча | | |

Липопротейн (а)

ИттипоTD (Иммунотурбодиметрический с латексными частицами)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-380

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек (набор стандартов TruCal Lp(a), 5 уровней + вода (физраствор)).

Контроль по TruLab Lp(a) уровень 1 и уровень 2.