


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200 /200 new.

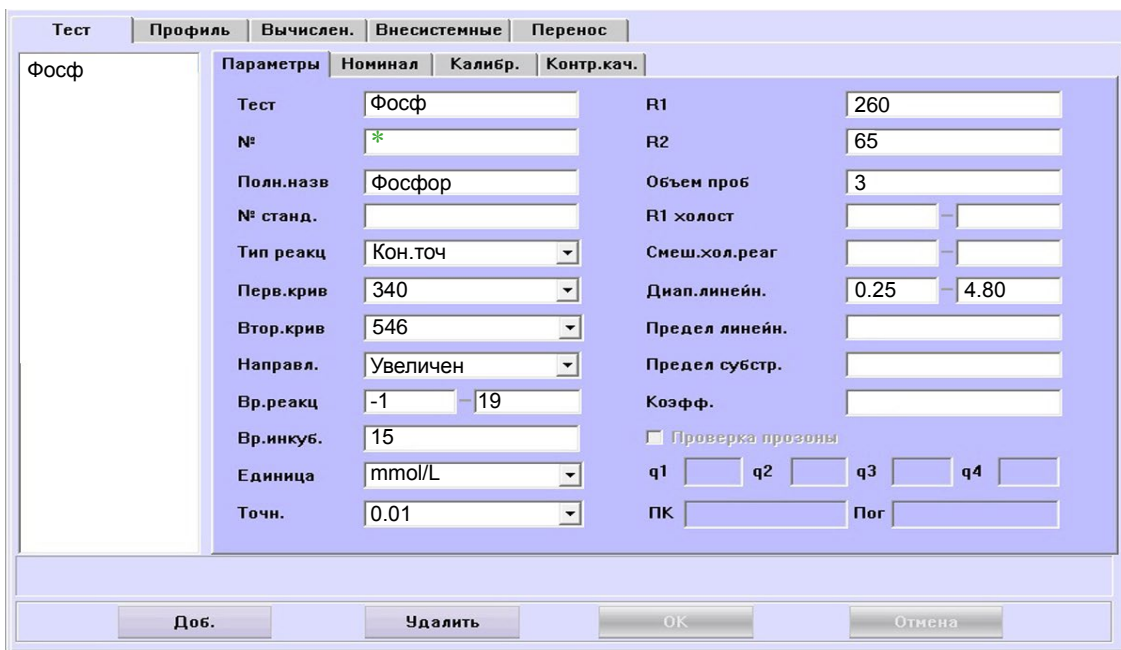

Тест: Фосф

Параметры: Номинал, Калибр., Контр.кач.

Тест: Фосф R1: 260

№: * R2: 65

Полн.назв: Фосфор Объем проб: 3

№ станд.: R1 холост:

Тип реакц: Кон.точ Смеш.хол.реаг:

Перв.крив: 340 Диап.линейн.: 0.25 4.80

Втор.крив: 546 Предел линейн.:

Направл.: Увеличен Предел субстр.:

Вр.реакц: -1 -19 Коэфф.:

Вр.инкуб.: 15 Проверка прозоны

Единица: mmol/L q1: q2: q3: q4:


Точн.: 0.01 ПК: Погр:

Доб. Удалить ОК Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

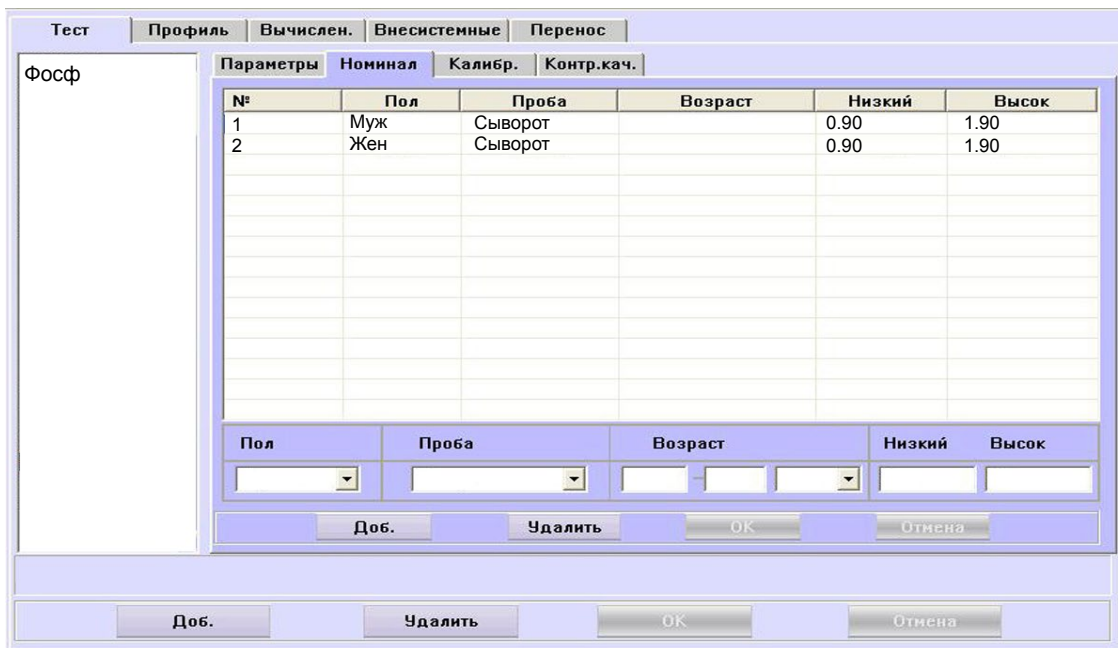

Тест: Фосф

Параметры: Номинал, Калибр., Контр.кач.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0.90	1.90
2	Жен	Сыворот		0.90	1.90

Пол: Проба: Возраст: Низкий: Высок:

Доб. Удалить ОК Отмена

Доб. Удалить ОК Отмена

Фосф

Параметры Номинал Калибр. Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. Удалить ОК Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU).

Контроль по TruLab N и TruLab P.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно.