

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-480

Опред./правка химанализов

Хим.	<input type="text" value="IgA"/>	№ *	<input type="text"/>	Тип пробы	<input type="text" value="Сыворотка"/>
Химанализ	<input type="text" value="Иммунотурбодиметрический"/>			Имя для печ	<input type="text" value="IgA"/>

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Тип реакции	<input type="text" value="Контрольная точка"/>	Направление реакции	<input type="text" value="Положительный"/>									
Перв. д/в	<input type="text" value="570"/>	Втор. д/в	<input type="text"/>									
Ед.изм.	<input type="text" value="г/л"/>	Десятич	<input type="text" value="0"/>									
Время хол.	<input type="text" value="47"/>	<input type="text" value="49"/>	Время реакции	<input type="text" value="79"/>	<input type="text" value="81"/>							
Об. Пробы	<input type="text" value="1,5"/>	Аспирировано	<input type="text"/>	Разбавитель	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Холост.проб						
Стандарт	<input type="text" value="1,5"/>	уL	<input type="text"/>	уL	<input type="text"/>	уL						
Понижен.	<input type="text" value="1,5"/>	уL	<input type="text" value="35"/>	уL	70	уL	P1	<input type="text" value="188"/>	уL	P2	<input type="text" value="38"/>	уL
Повышенный	<input type="text" value="3"/>	уL	<input type="text"/>	уL	<input type="text"/>	уL	P3	<input type="text"/>	уL	P4	<input type="text"/>	уL

Диап.линейности	<input type="text" value="0,3"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="checkbox"/> Автоповтор				
Предел линейности	<input type="text"/>						
Поглощ.хол. P1	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>	Источение субстрата	<input type="text"/>			
Отклик холост.	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>	Смеш.хол.погл.	<input type="text" value="-34000"/>	<input type="text" value="34000"/>		
Парн.химанализ	<input type="text"/>			Вр.после открытия	<input type="text"/>	Дней	
<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	<input type="radio"/> Пров. скорости	<input type="radio"/> Внесение антигена					
Q1	<input type="text"/>	Q2	<input type="text"/>	Q3	<input type="text"/>	Q4	<input type="text"/>
PC	<input type="text"/>	ABS	<input type="text"/>				

Нормальные величины для сыворотки (плазмы):

Мужчины: 0,7-4

Женщины: 0,7-4

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней+ вода (физраствор)).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.