

Бикарбонат

PEPC (метод фосфоенолпируваткарбоксилазой (ФЕПК))



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-100/200

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
★ Тест	: BCRB	Автоповтор : <input type="checkbox"/>
Наим. отчёта	: Бикарбонаты	Он-лайн калибровк : <input type="checkbox"/>
Ед.	: mmol/l	Знаки п/запятой : 1
Основная дл. волны	: 415	Вспомогат. : 505
Тип метода	: 2POINT	Тип калибровки : Linear
Нач. M1	: 7	Кон. M1 : 8
★ Нач. M2	: 33	★ Кон. M2 : 34
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта : 2
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля : 0
Напр-ние реакции	: Уменьшение	Предел погл. : 0.0
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны : .
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин. : 0.0
Технич. минимум	: 4	Технич. максимум : 50
Y=aX+b	a= : 1	b= : 0
★ Реагент R1 : BCRB R1		
Задайте он-лайн калибровку		
DOWNLOAD TEST		
UPLOAD TEST		
УСТАН. АВТОПОВТОР		
КОПИР. ТЕСТ		
ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)		

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности	Объемы теста	Контрольные интервалы
Тест	: BCRB	
Тип пробы	: SERUM	
Объемы проб		
★ Норм.	: 2.0 μ l	Проп. развед. : 1 X
Увелич.	: 4.0 μ l	Проп. развед. : 1 X
Уменьш.	: 2.0 μ l	Проп. развед. : 2 X
★ Объем стандарта	: 2.0 μ l	
Объемы реагентов и скор. мешалки		
★ Объем R1	: 200 μ l	★ Скор. мешалки R1 : Выс.
Типы проб		
<input checked="" type="checkbox"/> SERUM		
<input type="checkbox"/> URINE		
<input type="checkbox"/> CSF		
<input type="checkbox"/> PLASMA		
<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD		
<input type="checkbox"/> OTHER		
КОПИР. ОБЪЕМЫ		
ПРОСМ. ОБЪЕМОВ		

Бикарбонат

PEPC (метод фосфоенолпируваткарбоксилазой (ФЕПК))



Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : BCRB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Муж

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	22 29
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности Объемы теста **Контрольные интервалы**

Тест : BCRB

Тип пробы : SERUM

Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)

Категория : Жен

Контр. интервал	
Нижн. предел	Верхн. предел
* Норм.	22 29
Экстр.	0 0

Типы проб

- SERUM
- URINE
- CSF
- PLASMA
- WHOLE BLOOD
- OTHER

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ

ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: линейная калибратор(Bicarbonate Standard).
Контроль по TruLab Bicarbonat (один уровень).

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !