

Магний

Xylidil blue (метод с ксилитиновым синим)



Параметры для ввода в программу анализатора Metrolab-2300

Метод	Nombre del Metodo	Марка	Ед. изм.	Тип
Mg	Magnesium	DiaS	mmol/l	Color

Биохимия | Внешние | Расчетные | Разработка

Параметры | Детали

Длина волны (нм)	Нормальные пределы	Duracion en dias
Основная 550	Нижний Верхний	Калибровка 0
Бихромат.	М. 0,73 1,06	Колост. проба 0
	Ж. 0,77 1,03	

Объем (мкл)	Время (сек)	Пределы метода
Образец 2	2-й реаг. 0	Нижний 0,02
1-й реаг. 200	Инкубация 300	Верхний 2,05
2-й реаг. 0	Interval 0	Измен. ОП

Тип калибровки	Линейная	Direction
<input checked="" type="radio"/> Линейная	Фактор *	<input checked="" type="radio"/> Increase
<input type="radio"/> Нелинейная	Стандарт *	<input type="radio"/> Decrease

* Концентрация калибратора вводится в соответствии с паспортным значением. Фактор будет рассчитан автоматически после калибровки.

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Включен автоматический перезапуск анализа с разведением при выходе за диапазон линейности метода. При необходимости данный параметр может быть отключен.

Адаптации применимы к анализатору с кюветой бмм.

Адаптации для других типов образца запрашивайте дополнительно

Магний

Xylidil blue (метод с ксилидиновым синим)



Параметры для ввода в программу анализатора Metrolab-2300

Параметры | Детали

Пересчет Наклон: <input type="text" value="1"/> Смещение: <input type="text" value="0"/>	ОП реаг. Мин.: <input type="text" value="0"/> Макс.: <input type="text" value="10"/>	Пересчет фактора <input type="radio"/> Временно <input checked="" type="radio"/> Замена <input type="radio"/> Усреднение
Номенкл. код: <input type="text"/> Точность: <input type="text" value="2"/> Correlation Min.: <input type="text"/>	Сброс реагента (мкл) 1-й реаг.: <input type="text" value="10"/> 2-й реаг.: <input type="text"/>	Реагенты <input checked="" type="checkbox"/> Additional Shake <input checked="" type="checkbox"/> Integrity <input checked="" type="checkbox"/> Холост. проба <input type="checkbox"/> in cuvette
<input type="text"/>		Разведение 1 : <input type="text" value="1"/> <input type="checkbox"/> Спец. реагент