

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

| Подробности                   | Объемы теста                                  | Контрольные интервалы                         |
|-------------------------------|---|---|
| ★ Тест : C3                   | Автоповтор : <input type="checkbox"/>         | Он-лайн калибровка : <input type="checkbox"/> |
| Наим. отчёта : C3с            | Он-лайн калибровка : <input type="checkbox"/> | Cuvette Wash : <input type="checkbox"/>       |
| Ед. : g/l                     | Знаки п/запятой : 2                           | Всего реагентов : 2                           |
| Основная дл. волны : 340      | Вспомогат. : ----                             | ★ Реагент R1 : C3C R1                         |
| Тип метода : 2POINT           | Тип калибровки : 5p-logit-log                 | ★ Реагент R2 : C3C R2                         |
| Нач. M1 : 22                  | Кон. M1 : 24                                  |   |
| ★ Нач. M2 : 60                | ★ Кон. M2 : 62                                |   |
| Дубли пробы : 1               | Дубли стандарта : 2                           |   |
| Дубли контроля : 1            | Интервал контроля : 0                         |   |
| Напр-ние реакции : Увеличение | Предел погл. : 0.0                            |   |
| Предел прозоны, % : 0         | Проверка прозоны : Нижн.                      |   |
| Предел лин-сти, % : 0         | Приращ. погл./мин. : 0.0                      |   |
| Технич. минимум : 0           | Технич. максимум : 5                          |   |
| Y=aX+b    a= 1    b= 0        |   |   |

Задайте он-лайн калибровку

DOWNLOAD TEST

UPLOAD TEST

УСТАН. АВТОПОВТОР

КОПИР. ТЕСТ

ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

| Подробности       | Объемы теста | Контрольные интервалы |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| Тест : C3C        |              |                       |
| Тип пробы : SERUM |              |                       |

| Объемы проб       |       |    |               | Типы проб |   |
|-------------------|-------|----|---------------|-----------|---|
| ★ Норм.           | : 2.6 | µl | Проп. развед. | : 1       | <input checked="" type="checkbox"/> SERUM |
| Увелич.           | : 5   | µl | Проп. развед. | : 1       | <input type="checkbox"/> URINE            |
| Уменьш.           | : 2.6 | µl | Проп. развед. | : 4       | <input type="checkbox"/> CSF              |
| ★ Объем стандарта | : 2.6 | µl |               |           | <input type="checkbox"/> PLASMA           |
|                   |       |    |               |           | <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD      |
|                   |       |    |               |           | <input type="checkbox"/> OTHER            |

| Объемы реагентов и скор. мешалки |       |    |                            |
|----------------------------------|-------|----|----------------------------|
| ★ Объем R1                       | : 180 | µl | ★ Скор. мешалки R1 : Сред. |
| ★ Объем R2                       | : 36  | µl | ★ Скор. мешалки R2 : Выс.  |

КОПИР. ОБЪЕМЫ

ПРОСМ. ОБЪЕМОВ

## Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности | Объёмы теста | **Контрольные интервалы**

Тест : C3C  
 Тип пробы : SERUM  
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)  
 Категория : Муж

| Контр. интервал |              | Типы проб     |  |
|-----------------|--------------|---------------|--|
|                 | Нижн. предел | Верхн. предел |  |
| ★ Норм.         | 0.9          | 1.8           | <input checked="" type="checkbox"/> SERUM<br><input type="checkbox"/> URINE<br><input type="checkbox"/> CSF<br><input type="checkbox"/> PLASMA<br><input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD<br><input type="checkbox"/> OTHER |
| Экстр.          | 0            | 0             |  |

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ  
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Подробности | Объёмы теста | **Контрольные интервалы**

Тест : C3C  
 Тип пробы : SERUM  
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)  
 Категория : Жен

| Контр. интервал |              | Типы проб     |  |
|-----------------|--------------|---------------|--|
|                 | Нижн. предел | Верхн. предел |  |
| ★ Норм.         | 0.9          | 1.8           | <input checked="" type="checkbox"/> SERUM<br><input type="checkbox"/> URINE<br><input type="checkbox"/> CSF<br><input type="checkbox"/> PLASMA<br><input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD<br><input type="checkbox"/> OTHER |
| Экстр.          | 0            | 0             |  |

КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ  
 ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек. (набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода или физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !