

Иммуноглобулин М, Ig-M

ИттипоTD (Иммунотурбидиметрический)



Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест	IgM	R1	250
№	*	R2	50
Полн.назв	Иммуноглобулин-М	Объем проб	2
№ станд.		R1 холост	
Тип реакц	Кон.точ.	Смеш.хол.реаг	
Перв.крив	412	Диап.линейн.	0.25 - 8
Втор.крив	700	Предел линейн.	
Направл.	Увеличен	Предел субстр.	
Вр.реакц	-1 - 13	Козфф.	
Вр.инкуб.	14	Комп.	Наклон 1 Отс. 0
Единица	g/L	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
Точн.	0.01	q1	q2 q3 q4
		ПК	Пог

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок
1	Муж	Сыворот		0.40	2.30
2	Жен	Сыворот		0.40	2.30

Иммуноглобулин М, Ig-M

ИтипоTD (Иммунотурбидиметрический)

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

ИгМ

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Logit-Log-5P

Чувствител. []

Повторы 2

Интервал(дн) []

Предел разл. []

SD []

Холост. ответ [] []

Предел ошибки []

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> NaCl	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-1	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-2	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-3	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-4	**
<input checked="" type="checkbox"/> TcPr-5	**

Назв []

Конц. []

Разв.кал

Подробнее

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** -вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Log-Logit или сплайн, 6 точек, набор стандартов TruCal Protein, 5 уровней + вода (физраствор).

Контроль по TruLab Protein уровень 1 и уровень 2 или по TruLab N и TruLab P.