


Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

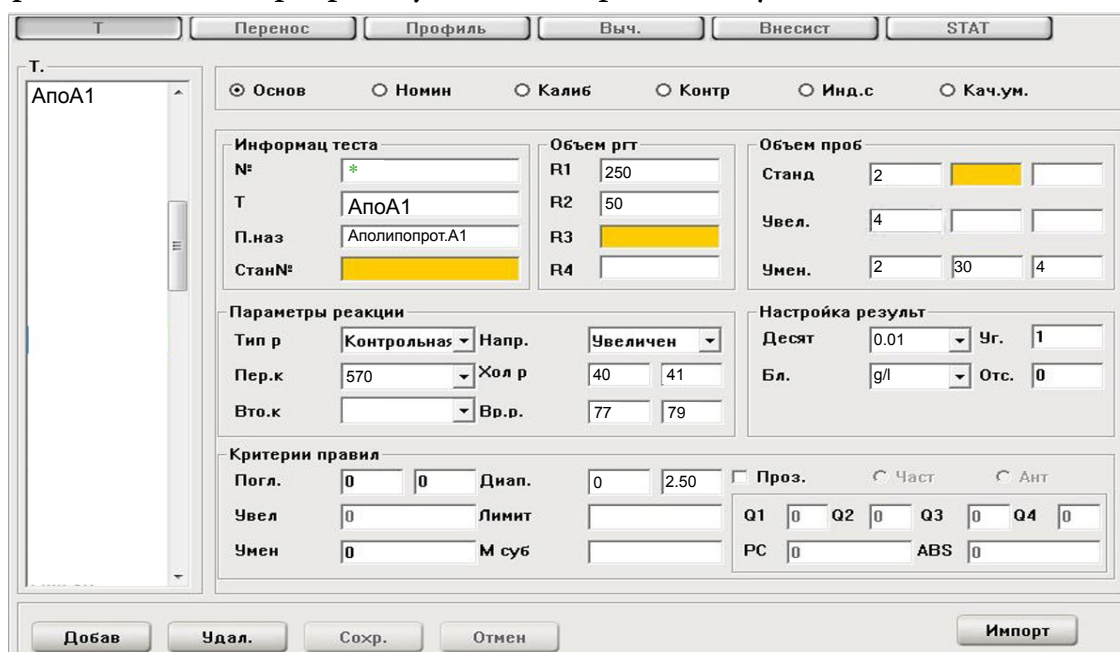

Т. АпоА1

Основ Номин Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

Информац теста
 №: *
 Т: АпоА1
 П.наз: Аполипопрот.А1
 Стан№:

Объем ргг
 R1: 250
 R2: 50
 R3:
 R4:

Объем проб
 Станд: 2
 Увел.: 4
 Умен.: 2 30 4

Параметры реакции
 Тип р: Контрольная Напр.: Увеличен
 Пер.к: 570 Хол р: 40 41
 Вто.к: Вр.р.: 77 79

Настройка результат
 Десят: 0.01 Уг.: 1
 Бл.: g/l Отс.: 0

Критерии правил
 Погл.: 0 0 Диап.: 0 2.50
 Увел.: 0 Лимит:
 Умен.: 0 М суб:


Проз. Част. Ант.
 Q1: 0 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0
 PC: 0 ABS: 0

Добав Удал. Сохр. Отмен Импорт

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

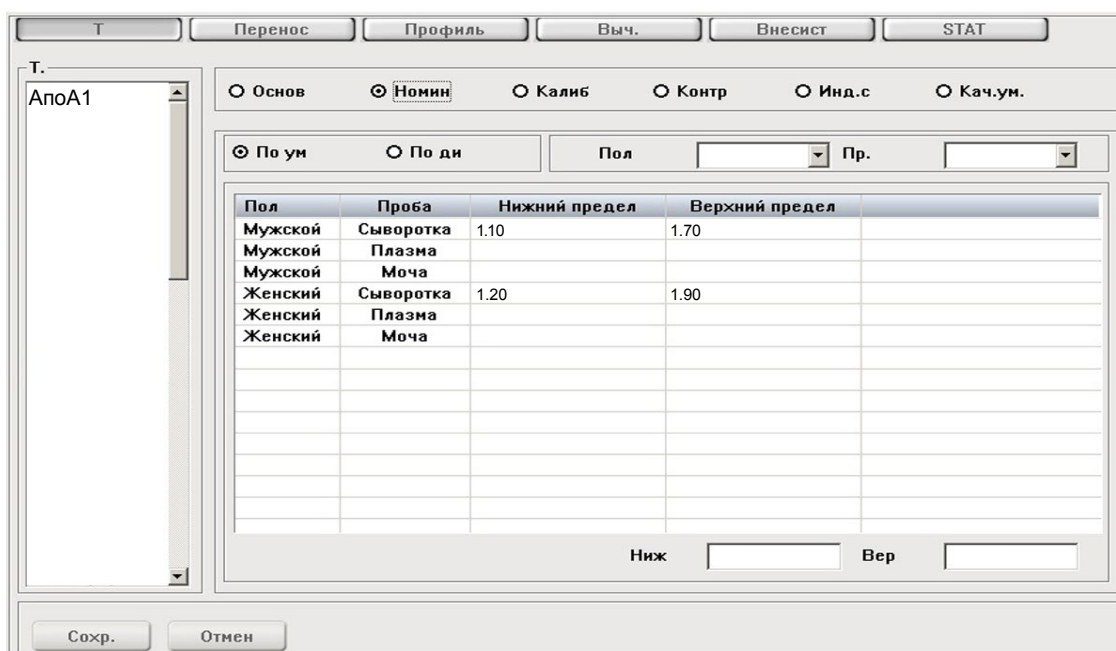

Т. АпоА1

Основ **Номин** Калиб Контр Инд.с Кач.ум.

По ум По дн Пол: Пр.:


Пол	Проба	Нижний предел	Верхний предел
Мужской	Сыворотка	1.10	1.70
Мужской	Плазма		
Мужской	Моча		
Женский	Сыворотка	1.20	1.90
Женский	Плазма		
Женский	Моча		

Ниж: Вер:

Сохр. Отмен

Значения калибраторов и контрольных материалов вводить в пунктах меню «Калибр.» и «Контр.кач.» соответственно.

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-400

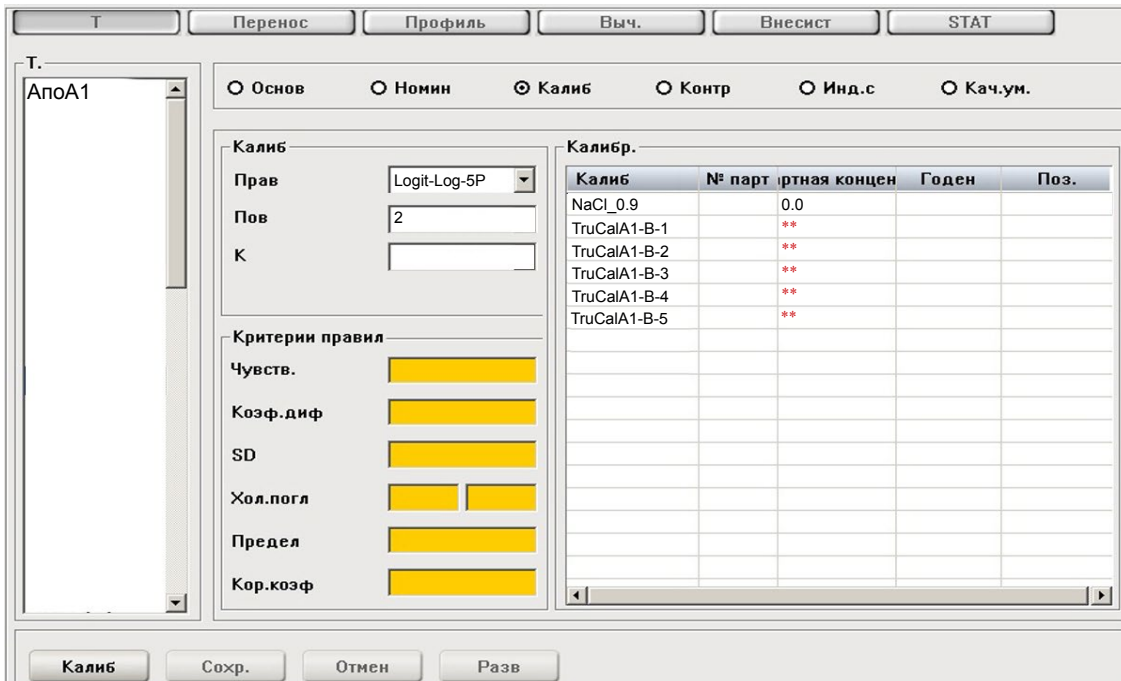

Калиб	№ парт	ртная концен	Годеп	Поз.
NaCl_0.9		0.0		
TruCalA1-B-1		**		
TruCalA1-B-2		**		
TruCalA1-B-3		**		
TruCalA1-B-4		**		
TruCalA1-B-5		**		

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Логит-Лог-5Р или Сплайн, 6 точек.

Набор стандартов TruCal Apo A1-B (5 уровней)+ вода (или физраствор).

Контроль по TruLab L уровень 1 и уровень 2 или TruLab N и TruLab P.