

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Альбум		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
Тест	Альбум	R1	200	R2	0	Объем проб	2	R1 холост	
№	*	Смеш.хол.реаг		Диап.линейн.	2 - 60	Предел линейн.		Предел субстр.	
Полн.назв	Альбумин	Коефф.		Комп.	Наклон 1	Отс.	0	<input type="checkbox"/> Проверка прозоны	
№ станд.		q1		q2		q3		q4	
Тип реакц	Кон.точ	ПК		Пог					
Перв.крив	546								
Втор.крив	700								
Направл.	Увеличен								
Вр.реакц	-1 - 38								
Вр.инкуб.									
Единица	g/L								
Точн.	0.1								

Доб. Удалить ОК Отмена

* Номер вводится вручную в соответствии с предыдущими тестами

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Тест		Профиль		Вычислен.		Внесистемные		Перенос	
Альбум		Параметры		Номинал		Калибр.		Контр.кач.	
№	Пол	Проба	Возраст	Низкий	Высок				
1	Муж	Сыворот		35	52				
2	Жен	Сыворот		35	52				
Пол		Проба	Возраст	Низкий	Высок				

Доб. Удалить ОК Отмена

Доб. Удалить ОК Отмена

Параметры для ввода в программу анализатора Mindray BS-200E

Тест | Профиль | Вычислен. | Внесистемные | Перенос

Альбум

Параметры | Номинал | Калибр. | Контр.кач.

Прав. Двухточ.линейн

Чувствител

Повторы 2

Интервал(дн)

Предел разл.

SD

Холост. ответ

Предел ошибки

Определение коэф. 0

Калибраторы

Назв	Конц.
<input checked="" type="checkbox"/> Вода	0.0
<input checked="" type="checkbox"/> TruCalU	**

Назв

Конц.

Разв.кал

Подроб

Выбор правила калибровки

Доб. | Удалить | ОК | Отмена

** - вводится из паспорта к калибратору

Тип калибровки: Линейная (калибратор TruCalU) или по стандарту из набора.
Контроль по TruLab N и TruLab P.