

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы		
★ Тест	: СКМБ	Автоповтор	: <input type="checkbox"/>			
Наим. отчёта	: КФК МБ	Он-лайн калибровк	: <input type="checkbox"/>			
Ед.	: УЛ	Знаки п/запятой	: 1	Cuvette Wash	: <input type="checkbox"/>	
Основная дл. волны	: 340	Вспомогат.	: 546	Всего реагентов	: 2	
Тип метода	: Rate-A	Тип калибровки	: Linear	★ Реагент R1	: СКМБ R1	
Нач. M1	: 0	Кон. M1	: 0	★ Реагент R2	: СКМБ R1	
★ Нач. M2	: 45	★ Кон. M2	: 60			
Дубли пробы	: 1	Дубли стандарта	: 2	<div style="text-align: center;"> <p>Задайте он-лайн калибровку</p> <p>DOWNLOAD TEST</p> <p>UPLOAD TEST</p> <p>УСТАН. АВТОПОВТОР</p> <p>КОПИР. ТЕСТ</p> <p>ИНИЦИАЛИЗ. ТЕСТ(Ы)</p> </div>		
Дубли контроля	: 1	Интервал контроля	: 0			
Напр-ние реакции	: Увеличение	Предел погл.	: 0.0			
Предел прозоны, %	: 0	Проверка прозоны	: Нижн			
Предел лин-сти, %	: 0	Приращ. погл./мин.	: 0.0			
Технич. минимум	: 1.0	Технич. максимум	: 2000.0			
Y=aX+b	a= 1	b= 0				

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя реагентов к набору и может быть изменен пользователем в соответствии с местными требованиями.

При использовании единиц измерения, отличающихся от приведенных, убедитесь, что значения стандартов, контрольных материалов, диапазонов нормальных значений и линейности метода введены в этих же единицах.

Подробности		Объемы теста		Контрольные интервалы	
Тест	: СКМБ				
Тип пробы	: SERUM				
Объемы проб				Типы проб	
★ Норм.	: 12	µl	Проп. развед.	: 1	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM
Увелич.	: 20	µl	Проп. развед.	: 1	<input type="checkbox"/> URINE
Уменьш.	: 4.0	µl	Проп. развед.	: 5	<input type="checkbox"/> CSF
★ Объем стандарта	: 8.0	µl			<input type="checkbox"/> PLASMA
					<input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD
					<input type="checkbox"/> OTHER
Объемы реагентов и скор. мешалки					
★ Объем R1	: 160	µl	★ Скор. мешалки R1	: Сред.	
★ Объем R2	: 40	µl	★ Скор. мешалки R2	: Выс.	
<div style="text-align: center;"> <p>КОПИР. ОБЪЕМЫ</p> <p>ПРОСМ. ОБЪЕМОВ</p> </div>					

Параметры для ввода в программу анализаторов Erba XL-640

Подробности | Объемы теста | **Контрольные интервалы**

Тест : CKMB
 Тип пробы : SERUM
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Муж

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.0	24	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

[КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ](#)
[ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ](#)

Подробности | Объемы теста | **Контрольные интервалы**

Тест : CKMB
 Тип пробы : SERUM
 Контр. интервал : 0 ГОД(Ы) — 99 ГОД(Ы)
 Категория : Жен

Контр. интервал		Типы проб	
	Нижн. предел	Верхн. предел	
★ Норм.	0.0	24	<input checked="" type="checkbox"/> SERUM <input type="checkbox"/> URINE <input type="checkbox"/> CSF <input type="checkbox"/> PLASMA <input type="checkbox"/> WHOLE BLOOD <input type="checkbox"/> OTHER
Экстр.	0	0	

[КОПИР. КОНТР. ИНТЕРВАЛЫ](#)
[ПРОСМ. КОНТР. ИНТЕРВАЛОВ](#)

Тип калибровки: линейная (Standard CK-M B *) или по фактору.
 Контроль по TruLab N и TruLab P.

Автоматический перезапуск анализа отключен. При необходимости данный параметр может быть активирован. ВАЖНО! В качестве разделителя целой и дробной части чисел необходимо использовать знак точки !